

뉴로헬스 설치 방법

설치 전 확인사항

- 설치 시 주의사항
 - 하나의 시리얼 키는 3회까지만 설치 가능 (단, 뉴로헬스는 2회)
 - 횟수 초과, 분실 시 재구매 하셔야 합니다.
 - 컴퓨터이상으로포맷 후 재설치 하는 경우, 본사로 문의주시면 2회에 한하여 재설치 도와드립니다.
- 컴퓨터 환경
 - 설치 시 인터넷에 연결되어있어야 합니다.
 - 윈도우 7 이상에서 사용가능합니다. (windows 7, windows 8.1, windows 10)
 - 권장사양
 - CPU(프로세서) : 인텔코어 i5 또는 AMD Ryzen5 이상
 - RAM(메모리) : 4GB 이상

Q : 시리얼 키가 어디 있을까요?





A : 제품 케이스 뚜껑 안쪽에 있습니다.

1. 영문으로 된 제품명 확인
2. 하단의 동일 프로그램명 확인
3. 16자리 시리얼 키 입력
4. 다운로드 완료




파낙토스 홈페이지 접속

- 인터넷 브라우저를 실행합니다.
 - 네이버 웨일과 크롬 브라우저는 브라우저 보안설정에 따라 다운로드가 진행되지 않을 수 있습니다. 인터넷 익스플로러 또는 마이크로소프트 엣지 브라우저를 사용을 권장합니다.
 - 본 가이드에서는 **마이크로소프트 엣지(Microsoft Edge)**를 사용하였습니다.

사용 추천	보안을 사유로 비추천
 Internet Explorer	 네이버 웨일
 Microsoft Edge	 Chrome

- 검색창에 “파낙토스” 를 입력하여 검색합니다.

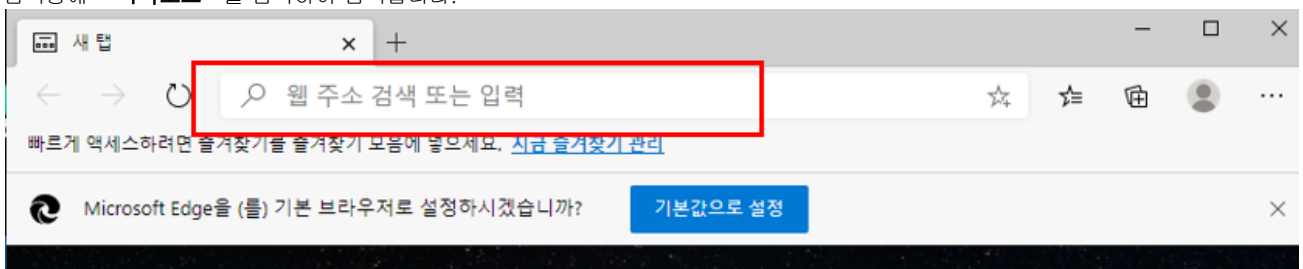

- 검색결과 중 “뇌과학1위기업 파낙토스”를 클릭합니다.

집중력은 파낙토스 뉴로하모니



<http://www.panaxtos.com> ▼

(광고) 뇌훈련센터, 기억력, 홀스클링, ADHD, BQ검사, 뉴로피드백훈련, 집중력 센터안내 · 가명안내 · 다운로드 · 제품소개

뉴로피드백 마인드브레인

<http://www.mindbrain.co.kr> ▼

(광고) 홀회원모집, 뉴로하모니, 1:1 예약제 훈련, 집중력, 불면개선, 정서안정 센터안내 · 홀회원 모집 · 제품구매 · 상담문의

이음두뇌연구소파낙토스

<https://ieumlab.modoo.at> ▼

(광고) 두뇌훈련과 심리미술활동을 통한 학습능률 파낙토스항상 프로그램 지난달에 사용자 10,000명 이상이 modoo.at에 방문했습니다.

파낙토스 다나와

<http://www.danawa.com> ▼

(광고) 파낙토스, 살 땀 사더라도 최저가로 알뜰쇼핑 하셔야죠! 가격비교 다나와! 지난달에 사용자 10,000명 이상이 danawa.com에 방문했습니다.

뇌과학 1위 기업 파낙토스

<https://www.panaxtos.com> ▼


파낙토스 병원특판 본부장 송은숙 입니다. 안녕하세요! 파낙토스 병원특판 본부장 송은숙 입니다. 전세계 뇌과학 1위 기업 파낙토스의 뉴로피드백 뇌파훈.. [병원특판 1지사] 송은숙 / 2020.11.13

설치프로그램 다운로드

- 화면 우측상단의 “로그인”을 클릭하여 로그인 합니다.
 - 아이디가 없는경우엔 “회원가입”을 먼저 진행 하신 후 로그인을 합니다.



- 로그인 진행 후, 좌측 하단의 “프로그램 다운로드”를 클릭합니다.

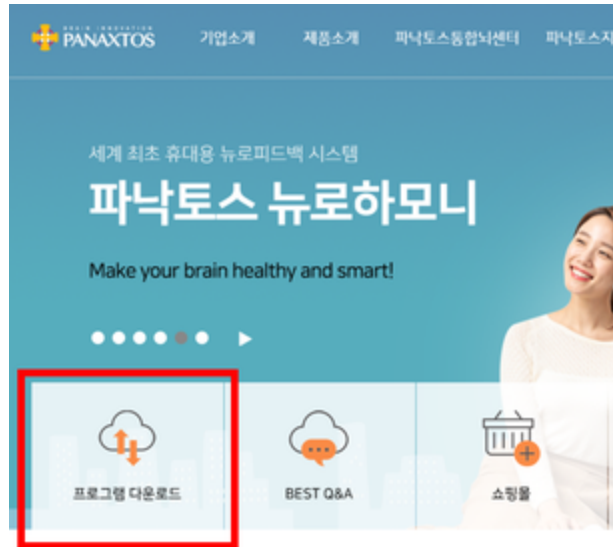

- 자료실로 이동되면, 좌측하단의 “필수 프로그램(PC 버전)”를 클릭합니다.

필수 프로그램 다운로드 | 자료실



- 패키지프로그램 중 뉴로헬스패키지(NeuroHealth)의 창에 시리얼코드를 입력 후 **확인** 클릭 합니다.

1. 패키지 프로그램


NeuroHarmony (뉴로하모니 패키지)	4자리 코드	4자리 코드	4자리 코드	4자리 코드	확인	설치방법
NeuroHealth (뉴로헬스 패키지)	4자리 코드	4자리 코드	4자리 코드	4자리 코드	확인	설치방법

- 이 화면에서 입력하시는 제품번호(시리얼키)는 사용횟수가 차감되지 않습니다.
- 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 입력시 영어, 숫자 혼동에 주의합니다.


숫자	알파벳
0	O

- 제품번호를 알맞게 입력하신 후 “확인” 버튼을 클릭하면, 다운로드가 진행됩니다. 다운로드가 완료되면 “모두 표시” 버튼을 클릭합니다.

1. 패키지 프로그램

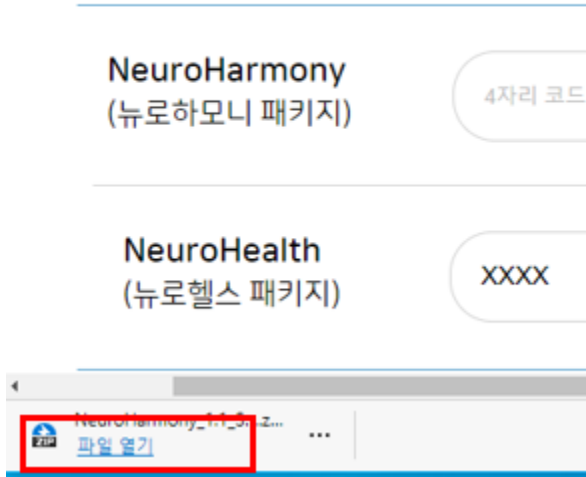

- NeuroHealth_1.5_Setup.zip 의 “폴더에 표시” 를 클릭하면 다운로드 받은 폴더가 나타납니다.

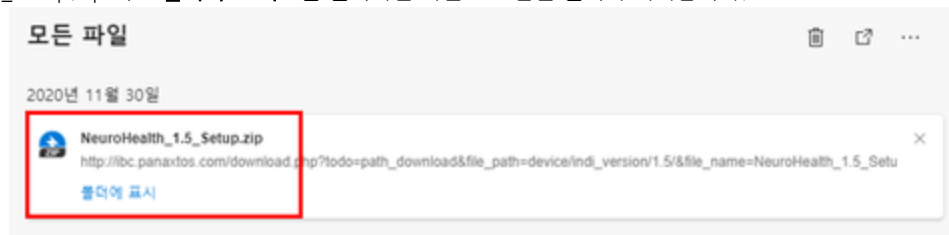

- 다운로드 폴더가 열리면 뉴로헬스 설치프로그램이 다운로드 된 것을 확인 할 수 있습니다.




이름	수정한 날짜	유형	크기
NeuroHealth_1.5_Setup.zip	2020-11-30 오후 2:33	압축(ZIP) 파일	964,130KB
	2020-11-25 오후 5:29	파일 폴더	

압축해제(압축풀기)

- NeuroHealth_1.5_Setup 을 마우스 오른쪽 클릭하면 메뉴가 열립니다.
 - 아래와 같은 방법을 통해 압축을 해제합니다
 - 검색어 글씨(NeuroHealth_1.5_setup)부분을 마우스 오른쪽 클릭해야 메뉴가 열립니다.

사용하시는 컴퓨터에 따라 보이는 화면이 다릅니다.

자신의 컴퓨터에 나타나는 “압축풀기” 를 진행해주세요.

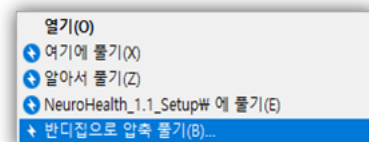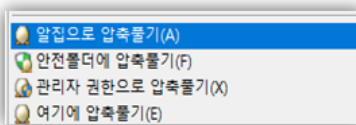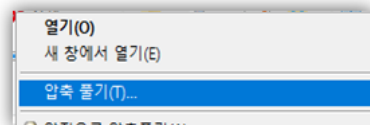

“압축 풀기” 클릭	“알집으로 압축풀기”클릭	“반디집으로 압축풀기”클릭
<div> <div>이름</div> <div>수정된 날짜</div> <div>유형</div> <div>크기</div> </div> <div> <div>NeuroHealth_1.5_Setup.zip</div> <div>2020-11-30 오후 2:33</div> <div>압축(2P) 파일</div> <div>964.130KB</div> </div> <div> <div>NeuroHealth_1.5_Setup</div> <div>2020-11-30 오후 2:37</div> <div>파일 폴더</div> <div></div> </div>		
(위) 압축해제 전 / (아래) 압축해제 완료)		

- ❌ 알집으로 압축풀기를 하시는 경우, 안전폴더에 풀기 버튼이 나타납니다.
- 진행하게되면 정상적인 설치가 안되기때문에, 반드시 “예” 를 눌러주세요.
 - 컴퓨터에 따라 나타나지 않을 수 있습니다.

의심 파일 경고



의심되는 파일이 포함되어 있습니다. 압축해제를 진행하시겠습니까?

이 파일은 안전폴더에 압축해제 후 바이러스 검사를 권장합니다.

압축파일에 이중확장자가 포함되어 있습니다. [\(신고하기\)](#)

C:\Users\user1\Down...\NeuroHarmony_1.1_Setup.zip

안전폴더에 풀기

예

아니오

설치


- 압축해제 된 NeuroHealth_1.5_setup 폴더에 진입 하신 후 “NeuroHealth_1.5_setup” 를 실행합니다.

이름	수정된 날짜	유형	크기
NeuroHealth_1.5_Setup.exe	2020-10-27 오전 1:04	응용 프로그램	964,129KB


- ❌ 컴퓨터의 설정에 따라 Windows의 PC보호가 나타날 수 있습니다.
아래의 방법을 따라 진행하신 후 NeuroHarmony_1.1_setup을 다시 실행합니다.
- 방법1에 따라 진행하시고, 안되는 경우 방법2로 진행합니다.

방법1


방법2

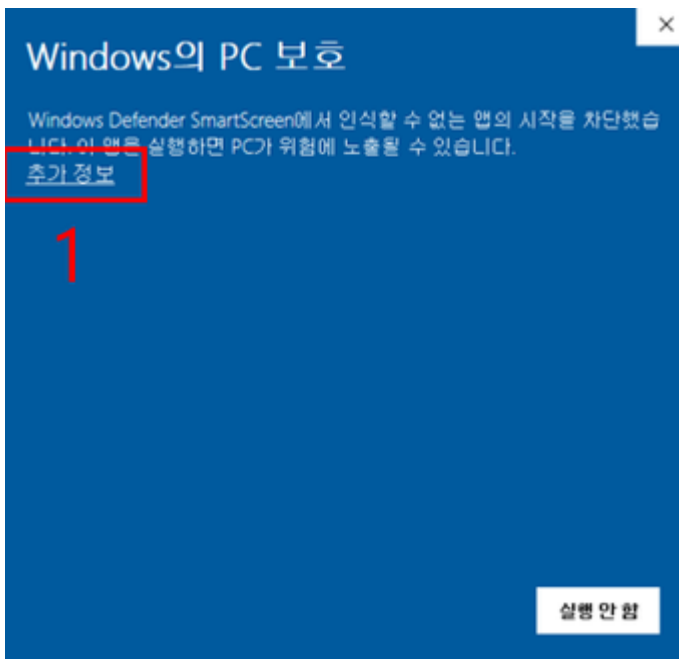


“추가정보” 클릭

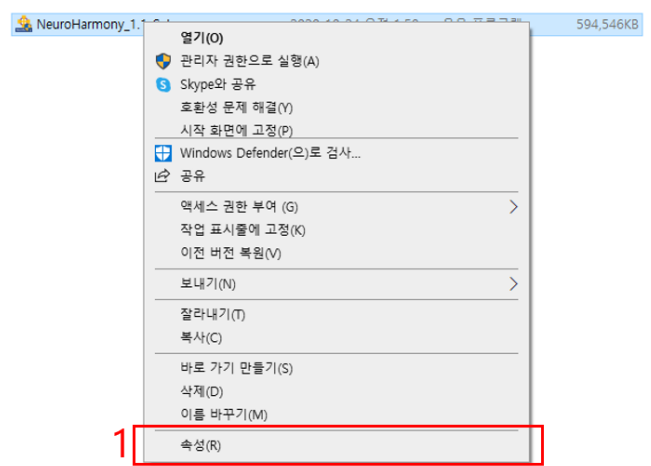

1. “NeuroHarmony_1.1_setup” 우클릭
> “속성” 클릭

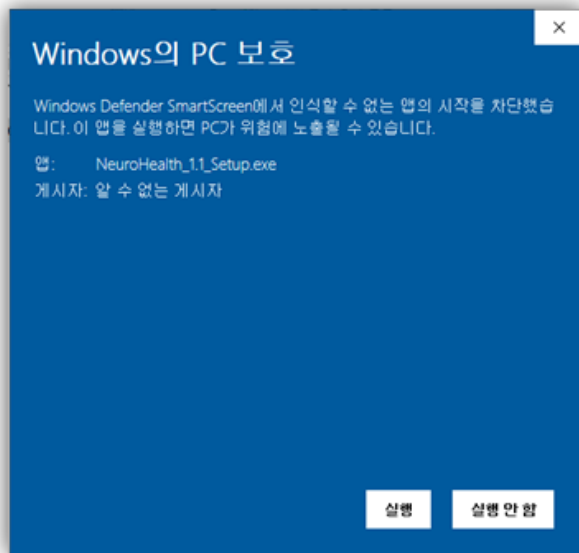


“실행” 클릭

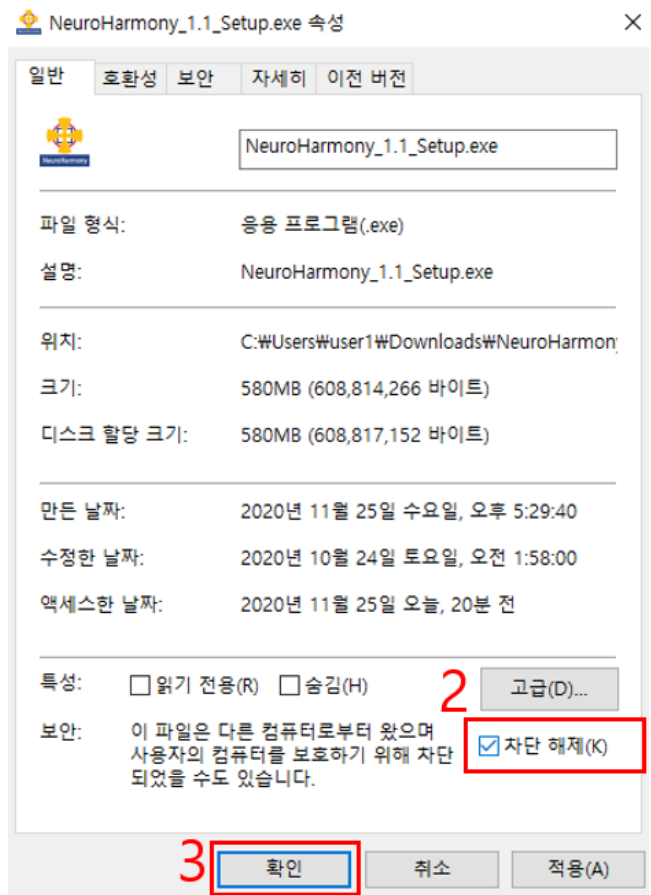


2. “차단 해제” 체크

3. “확인” 클릭


- 설치 과정은 표를 따라 진행합니다.

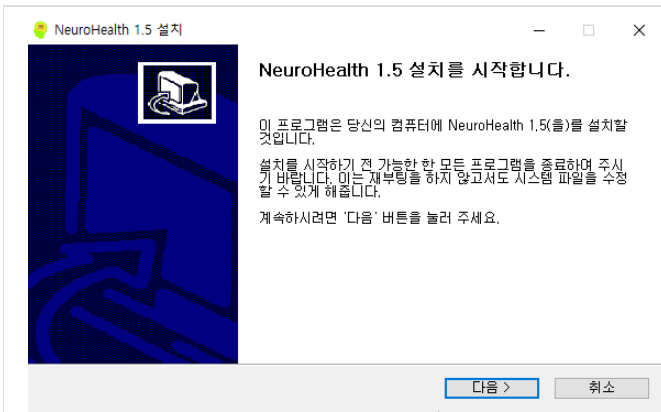


“다음” 클릭

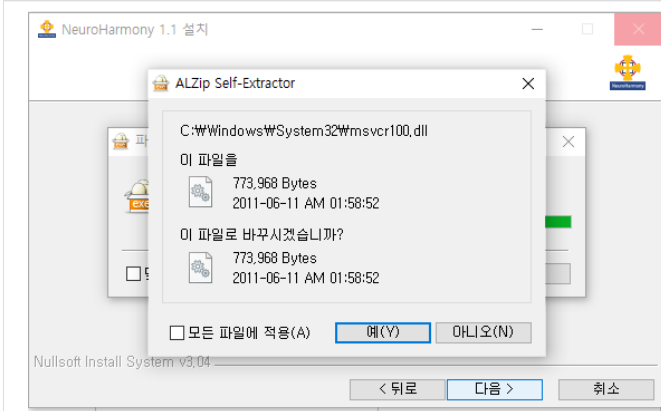

“예” 클릭

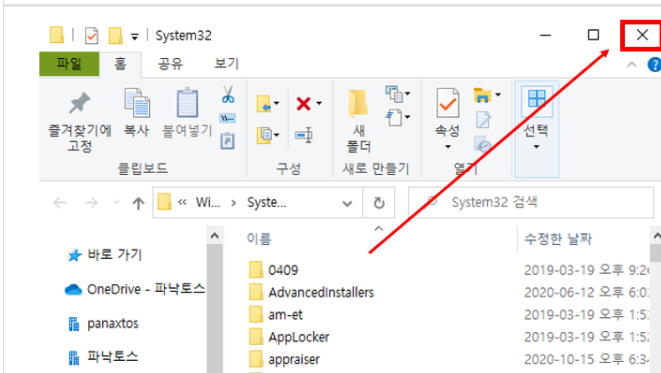


폴더가 많은 창이 나타나는데,
우측 상단의 “X” 클릭하여 닫기

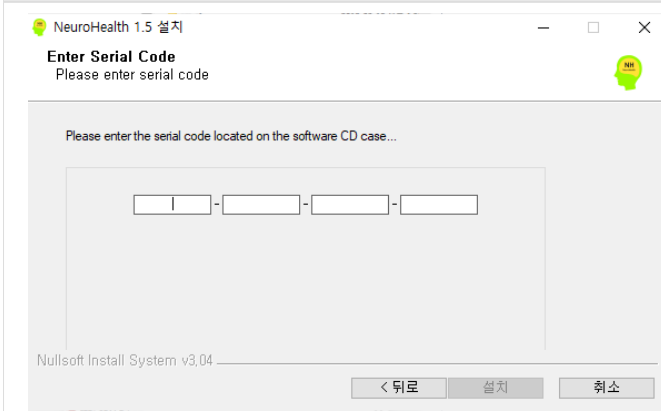


제품번호(시리얼키)를 다시 입력 한 후
”설치” 버튼을 클릭합니다.


- 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 입력시 영어, 숫자 혼동에 주의합니다.

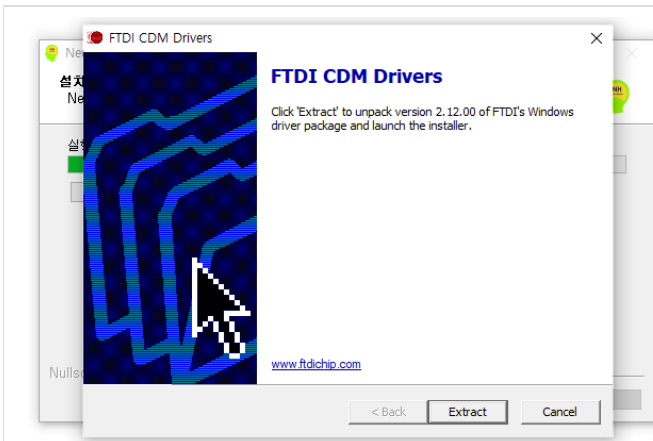

“Extract” 클릭

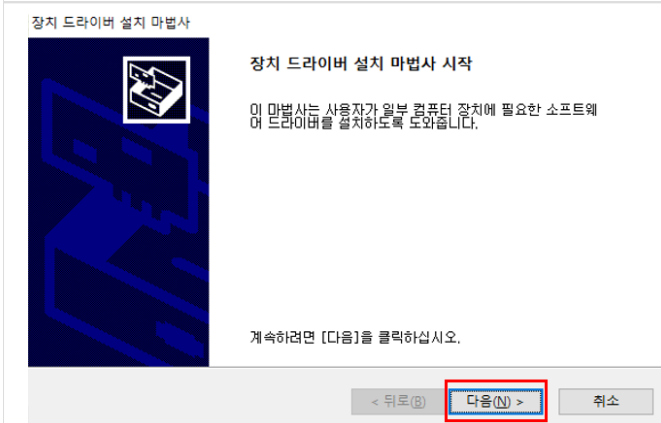


“다음” 클릭

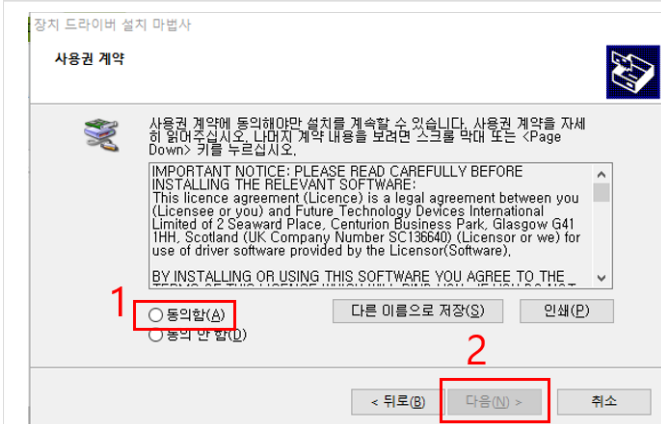

1. “동의함” 체크
2. “다음” 클릭



“마침” 클릭

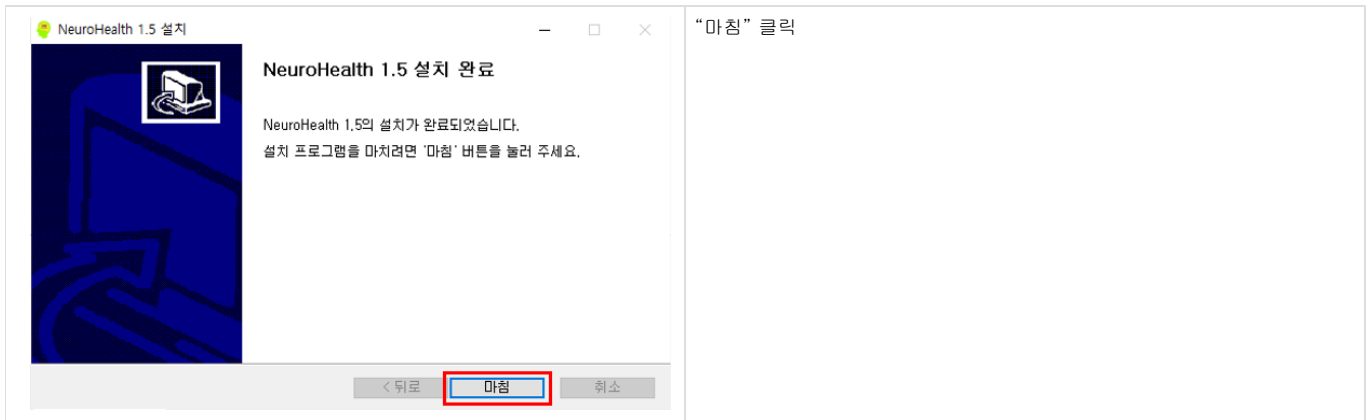


❌ 제품번호(시리얼키)입력 시 오류가 발생하는 경우

- Unkown faliture!
 - 인터넷연결이 안되어 있는 경우 나타날 수 있습니다 . 인터넷을 연결해주세요.
- Wrong serial number
 - 시리얼키를 잘못입력 한 경우 나타납니다.
 - 숫자 1과 영문 l / 숫자 0과 영문O를 구분합니다.
- Exceeded the limithe install count
 - 하나의 시리얼키로 3번까지 설치가 가능하며, 설치횟수가 초과 된 경우 발생합니다.
 - 사용횟수가 모두 소진 된 상태에서 컴퓨터 고장 등으로 인하여 재설치를 하시는 경우 본사로 연락주시면 1회에 한하여 횟수조정이 가능합니다.
 - 사용횟수 소진 시 프로그램의 시리얼키를 새로 구매하셔야합니다.

i 프로그램 실행하기

- 바탕화면의 “NeuroHealth1.5” 아이콘을 더블클릭하여 실행합니다.

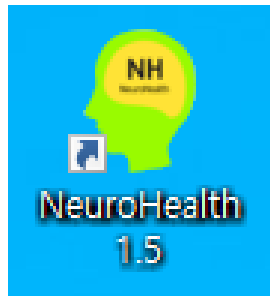

- 가장 먼저 “트레이닝 프로토콜”을 클릭하여 훈련모드를 설정합니다.
 - 자신의 훈련프로토콜을 아시는 경우 YES를 눌러 선택하고,
 - 모르는 경우 NO를 누르면 자신에게 적합한 훈련모드를 찾기위해 검사가 진행됩니다.

트레이닝 프로토콜

자신의 훈련프로토콜을 아십니까?

YES

NO

브레인 헬스



브레인 플레이



브린트 이터닝



성장



호르몬 밸런스



씨름런



뉴로스펙

