


# BQtester에서 BFN파일의 정보를 수정하는 방법

2009년 10월 19일

(재)한국정신과학연구소


# BQtester에서 BFN파일의 정보 수정방법.

- BQtester 프로그램을 실행 시킨 후 INFORMATION 을 선택합니다.

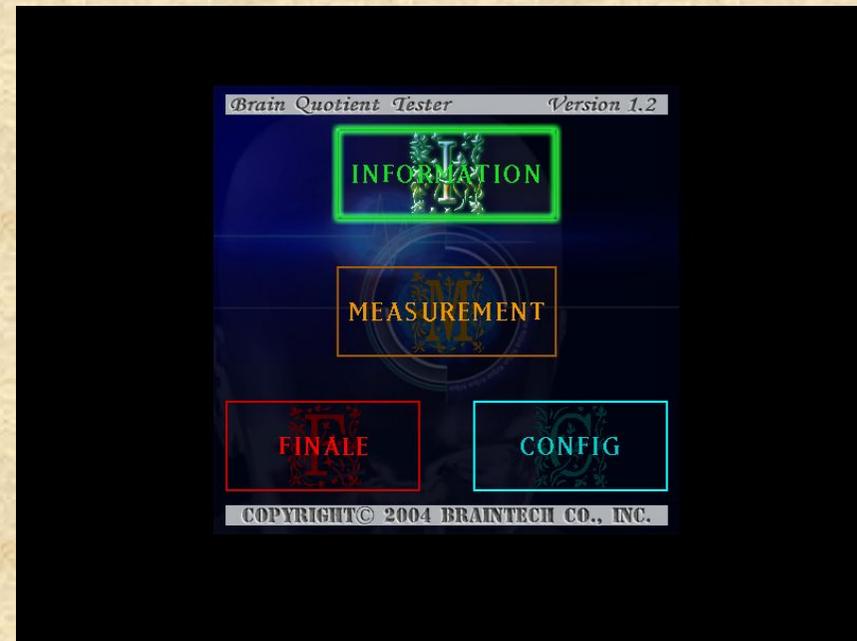

# BQtester에서 BFN파일의 정보 수정방법.

- INFORMATION 을 선택하면 우측 그림과 같이 나옵니다.
- 아래의  
“확인”, “취소”, “편집”  
에서 “편집”을 선택합니다.

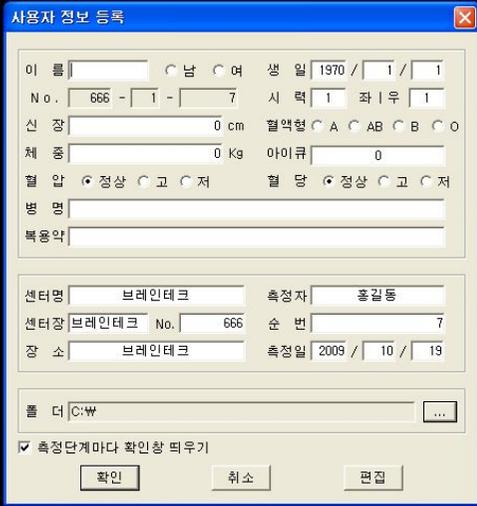

사용자 정보 등록

이름	<input type="text"/>	남 <input type="radio"/> 여 <input type="radio"/>	생일	1970 / 1 / 1
No.	666 - 1 - 7	시력	1 좌   우   1	
신장	<input type="text"/> 0 cm	혈액형	A <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> B <input type="radio"/> O <input type="radio"/>	
체중	<input type="text"/> 0 Kg	아이큐	<input type="text"/> 0	
결막	<input checked="" type="radio"/> 정상 <input type="radio"/> 고 <input type="radio"/> 저	결막	<input checked="" type="radio"/> 정상 <input type="radio"/> 고 <input type="radio"/> 저	
병명	<input type="text"/>			
복용약	<input type="text"/>			
센터명	브레인테크	축정자	홍길동	
센터장	브레인테크 No. 666	순번	7	
장소	브레인테크	축정일	2009 / 10 / 19	


폴더 C:\\*W ...

축정단계마다 확인창 띄우기

확인 취소 편집

# BQtester에서 BFN파일의 정보 수정방법.

- “편집”에서 수정할 BFN파일을 선택합니다.

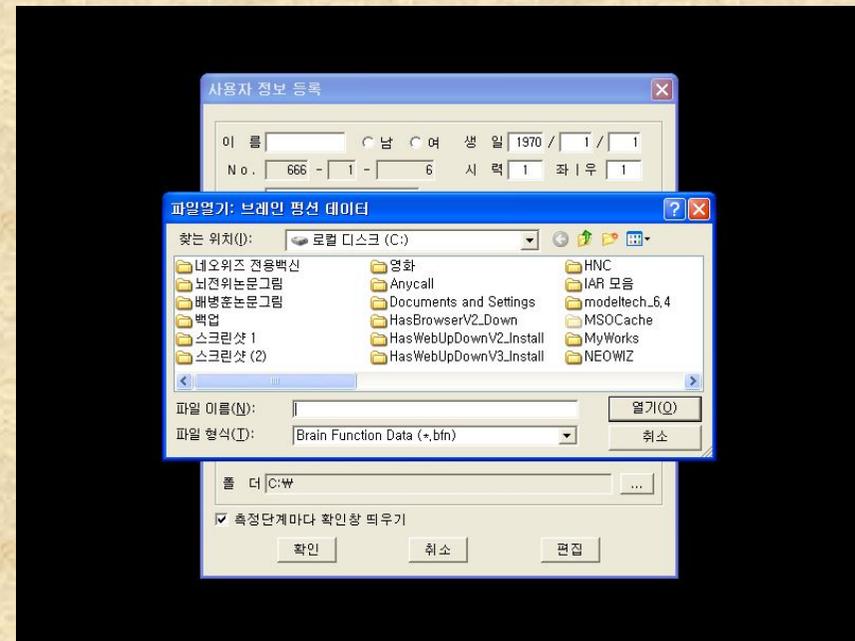

## BQtester에서 BFN파일의 정보 수정방법.

- “편집”에서 불러온 BNF파일에서 필요한 정보를 수정 후 “확인”을 누르면 수정된 정보가 저장이 됩니다.
- 정보 수정 유/무는 편집된 BFN파일을 다시 불러오면 수정된 내용을 볼 수 있습니다.

The screenshot shows a dialog box titled "사용자 정보 등록" (User Information Registration). It contains the following fields and values:

이름	金明花	성	남	여	생일	1970 / 1 / 1	
No.	777 - 2 - 7	시력	1	좌	우	1	
신장	160 cm	혈액형	A	AB	B	O	
체중	46 Kg	아이큐	100				
결압	정상	고	저	결당	정상	고	저
병명	none						
복용약	none						
센터명	한국지사	축정자	김화				
센터장	홍길동	No.	777	순번	7		
장소	중국지사	축정일	2009 / 7 / 27				

At the bottom, there is a checkbox labeled "축정단계마다 확인창 띄우기" (Show confirmation window at each stage) which is checked. Below it are three buttons: "확인" (Confirm), "취소" (Cancel), and "편집" (Edit).