

뉴로헬스BT(블루투스) 설치 방법

1 설치 전 확인사항





- 설치 시 주의사항
 - 하나의 시리얼 키는 3회까지만 설치 가능합니다.(단, 뉴로헬스는 2회)
 - 횡수 초과, 분실 시 재구매 하셔야 합니다.
 - 컴퓨터이상으로포맷 후 재설치 하는 경우, 본사로 문의주시면 2회에 한하여 횡수조정이 진행됩니다.
- 컴퓨터 환경
 - 설치 시 인터넷에 연결되어있어야 합니다.
 - 윈도우 10 에서 사용하는것을 권장 드립니다.
 - 권장사양
 - CPU(프로세서) : 인텔코어 i5 또는 AMD Ryzen5 이상
 - RAM(메모리) : 4GB 이상
 - 블루투스 버전 5.0 이상 (블루투스 버전은 컴퓨터 제조사에 문의해주세요)




[뉴로하모니 S20] 카드형 프로그램 시리얼키 동봉

1 파낙토스 홈페이지 접속

- 인터넷 브라우저를 실행합니다.
 - 네이버 웨일과 크롬 브라우저는 브라우저 보안설정에 따라 다운로드가 진행되지 않을 수 있습니다. 인터넷 익스플로어 또는 마이크로소프트 엣지 브라우저를 사용을 권장합니다.
 - 본 가이드에서는 **마이크로소프트 엣지(Microsoft Edge)**를 사용하였습니다.

사용 추천	보안을 사유로 비추천
 Internet Explorer	 네이버 웨일
 Microsoft Edge	 Chrome

- 검색창에 “파낙토스” 를 입력하여 검색합니다.

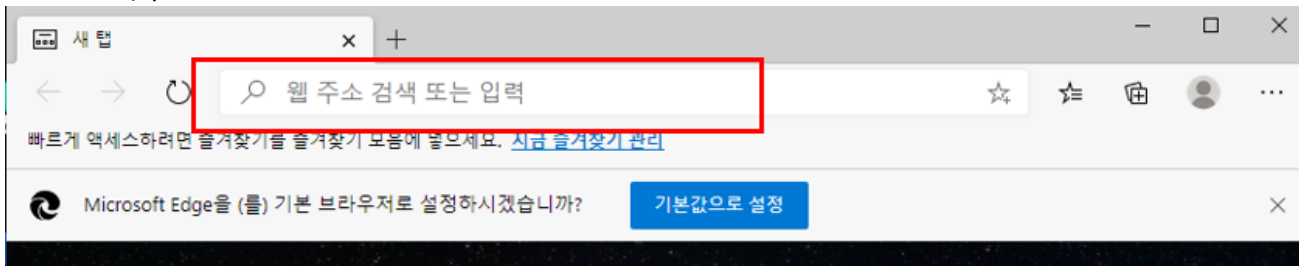

- 검색결과 중 “**뇌과학1위기업 파낙토스**”를 클릭합니다.

집중력은 파낙토스 뉴로하모니



<http://www.panaxtos.com> ▼

(광고) 뇌훈련센터, 기억력, 홈스쿨링, ADHD, BQ검사, 뉴로피드백훈련, 집중력 센터안내 · 가명안내 · 다운로드 · 제품소개

뉴로피드백 마인드브레인

<http://www.mindbrain.co.kr> ▼

(광고) 홈회원모집, 뉴로하모니, 1:1 예약제 훈련, 집중력, 불면개선, 정서안정 센터안내 · 홈회원 모집 · 제품구매 · 상담문의

이음두뇌연구소파낙토스

<https://ieumlab.modoo.at> ▼

(광고) 두뇌훈련과 심리미술활동을 통한 학습능률 파낙토스항상 프로그램 지난달에 사용자 10,000명 이상이 modoo.at에 방문했습니다.

파낙토스 다나와

<http://www.danawa.com> ▼

(광고) 파낙토스, 살 땀 사더라도 최저가로 알뜰쇼핑 하셔야죠! 가격비교 다나와! 지난달에 사용자 10,000명 이상이 danawa.com에 방문했습니다.

뇌과학 1위 기업 파낙토스

<https://www.panaxtos.com> ▼

파낙토스 병원특판 본부장 송은숙 입니다. 안녕하십니까. 파낙토스 병원특판 본부장 송은숙 입니다. 전세계 뇌과학 1위 기업 파낙토스의 뉴로피드백 뇌파훈.. [병원특판 1지사] 송은숙 / 2020.11.13

1 제품 인증



- 제품인증은 제품구매시 진행하며, 인증을 하지않은경우 프로그램을 다운받을 수 없습니다.
- 제품인증 미 진행시 프로그램사용 및 제품AS에 불이익을 받을 수 있습니다.
- **제품인증을 이미 하신 경우, 프로그램 다운로드를 진행하시면 됩니다.**

- 화면 우측상단의 “로그인”을 클릭하여 로그인 합니다.
 - 아이디가 없는경우엔 “회원가입”을 먼저 진행 하신 후 로그인을 합니다.



- 마이페이지 > 제품인증을 클릭하여 이동합니다.



- 제품인증 화면에서 구매한 제품을 등록하고, 등록내역을 확인 할 수 있습니다. “제품인증”을 클릭합니다.



- 왼쪽 사진의 이미지를 참고하여 제품 박스에 부착된 인증번호를 입력 합니다.



- 인증이 완료되면, 아래 그림과 같이 소유중인 밴드가 추가됩니다.



1 프로그램 다운로드

- 로그인 진행 후, 좌측 하단의 “프로그램 다운로드”를 클릭합니다.

세계 최초 휴대용 뉴로피드백 시스템

파낙토스 뉴로하모니

Make your brain healthy and smart!



BEST Q&A



쇼핑몰



- 자료실로 이동되면, 좌측하단의 “필수 프로그램(PC 버전)” 를 클릭합니다.




- 시리얼키 입력 창에 시리얼코드를 입력 후 **확인** 클릭 합니다.




- 이 화면에서 입력하시는 제품번호(시리얼키)는 사용횟수가 차감되지 않습니다.
- 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 입력시 영어, 숫자 혼동에 주의합니다.

숫자	알파벳
0	O
1	I

- 제품번호를 알맞게 입력하신 후 **“확인”** 버튼을 클릭하면, 다운로드화면이 활성화 됩니다.
 - 블루투스 연결을 위해 반드시 BT Setup 다운로드 및 설치해야합니다.

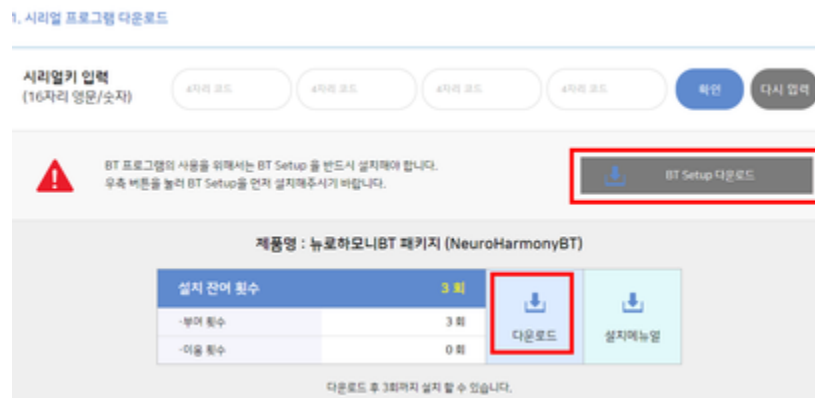

- 다운로드 완료 후 **“파일 열기”** 를 클릭하면 다운로드 받은 폴더가 나타납니다.

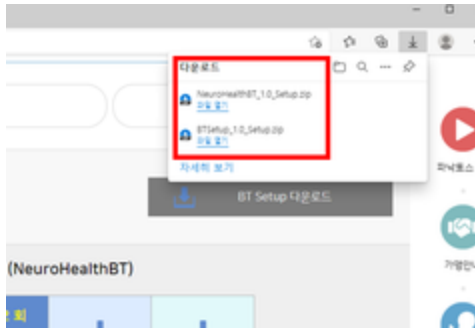

- 다운로드 폴더가 열리면 뉴로헬스BT와 Btsetup 설치프로그램이 다운로드 된 것을 확인 할 수 있습니다.

이름	수정된 날짜	유형
NeuroHealthBT_1.0_Setup.zip	2021-09-01 오전 9:24	압축(ZIP) 파일
BTSetup_1.0_Setup.zip	2021-09-01 오전 9:24	압축(ZIP) 파일
	2021-08-27 오전 11:16	텍스트 문서

1 압축해제(압축풀기)

- 압축파일을 마우스 오른쪽 클릭하면 메뉴가 열립니다.
 - BTSetup_1.0_Setup 파일의 압축해제
 - NeuroHealthBT_1.0_Setup 파일의 압축해제
 - 아래와 같은 방법을 통해 압축을 해제합니다
 - 검색어 글씨(BTSetup_1.0_Setup 또는 NeuroHealthBT_1.0_Setup)부분을 마우스 오른쪽 클릭해야 메뉴가 열립니다.

사용하시는 컴퓨터에 따라 보이는 화면이 다릅니다.


자신의 컴퓨터에 나타나는 “압축풀기” 를 진행해주세요.

“압축 풀기” 클릭	“알집으로 압축풀기”클릭	“반디집으로 압축풀기”클릭																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>이름</th> <th>수정된 날짜</th> <th>유형</th> <th>크기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NeuroHealthBT_1.0_Setup.zip</td> <td>2021-09-01 오전 9:24</td> <td>압축(ZIP) 파일</td> <td>973,131KB</td> </tr> <tr> <td>BTSetup_1.0_Setup.zip</td> <td>2021-09-01 오전 9:24</td> <td>압축(ZIP) 파일</td> <td>2,099KB</td> </tr> <tr> <td>NeuroHealthBT_1.0_Setup</td> <td>2021-09-01 오전 9:37</td> <td>파일 폴더</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BTSetup_1.0_Setup</td> <td>2021-09-01 오전 9:37</td> <td>파일 폴더</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			이름	수정된 날짜	유형	크기	NeuroHealthBT_1.0_Setup.zip	2021-09-01 오전 9:24	압축(ZIP) 파일	973,131KB	BTSetup_1.0_Setup.zip	2021-09-01 오전 9:24	압축(ZIP) 파일	2,099KB	NeuroHealthBT_1.0_Setup	2021-09-01 오전 9:37	파일 폴더		BTSetup_1.0_Setup	2021-09-01 오전 9:37	파일 폴더	
이름	수정된 날짜	유형	크기																			
NeuroHealthBT_1.0_Setup.zip	2021-09-01 오전 9:24	압축(ZIP) 파일	973,131KB																			
BTSetup_1.0_Setup.zip	2021-09-01 오전 9:24	압축(ZIP) 파일	2,099KB																			
NeuroHealthBT_1.0_Setup	2021-09-01 오전 9:37	파일 폴더																				
BTSetup_1.0_Setup	2021-09-01 오전 9:37	파일 폴더																				

(위) 압축해제 전 / (아래) 압축해제 완료

- ✘ 알집으로 압축풀기를 하시는 경우, 안전폴더에 풀기 버튼이 나타납니다.

- 진행하게되면 정상적인 설치가 안되기때문에, 반드시 “예” 를 눌러주세요.
- 컴퓨터에 따라 나타나지 않을 수 있습니다.

 **의심되는 파일이 포함되어 있습니다. 압축해제를 진행하시겠습니까?**

이 파일은 안전플더에 압축해제 후 바이러스 검사를 권장합니다.

압축파일에 이중확장자가 포함되어 있습니다. [\(신고하기\)](#)
 C:\Users\user1\Down...\NeuroHarmony_1.1_Setup.zip

1 설치

- 압축해제 된 BTSetup_1.0_Setup 폴더에 진입 하신 후 "BTSetup_1.0_Setup" 를 실행합니다.

이름	수정된 날짜	유형
 BTSetup_1.0_Setup.exe	2021-08-27 오후 4:23	응용 :

- 설치창이 나오면 "다음"을 클릭하여 설치 진행합니다.



BTSetup 1.0 설치

BTSetup 1.0 설치를 시작합니다.

이 프로그램은 당신의 컴퓨터에 BTSetup 1.0(들)을 설치할 것입니다.


설치를 시작하기 전 가능한 한 모든 프로그램을 종료하여 주시기를 바랍니다. 이는 재부팅을 하지 않고서도 시스템 파일을 수정할 수 있게 해줍니다.

계속하시려면 '다음' 버튼을 눌러주세요.

- 설치가 완료되면 "마침"버튼을 클릭하여 설치 종료합니다.




- 같은 방식으로 NeuroHealthBT_1.0_Setup폴더에 진입하여 "NeuroHealthBT_1.0_Setup" 파일을 실행합니다.

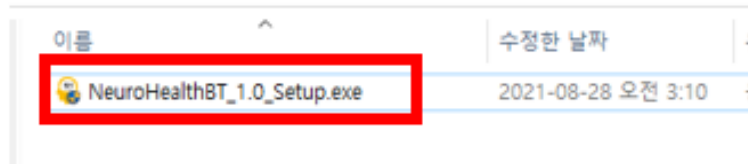


- ❌ 컴퓨터의 설정에 따라 Windows의 PC보호가 나타날 수 있습니다. 아래의 방법을 따라 진행하신 후 설치파일을 다시 실행합니다.
 - 방법1에 따라 진행하시고, 안되는 경우 방법2로 진행합니다.

방법1


방법2 (예시)

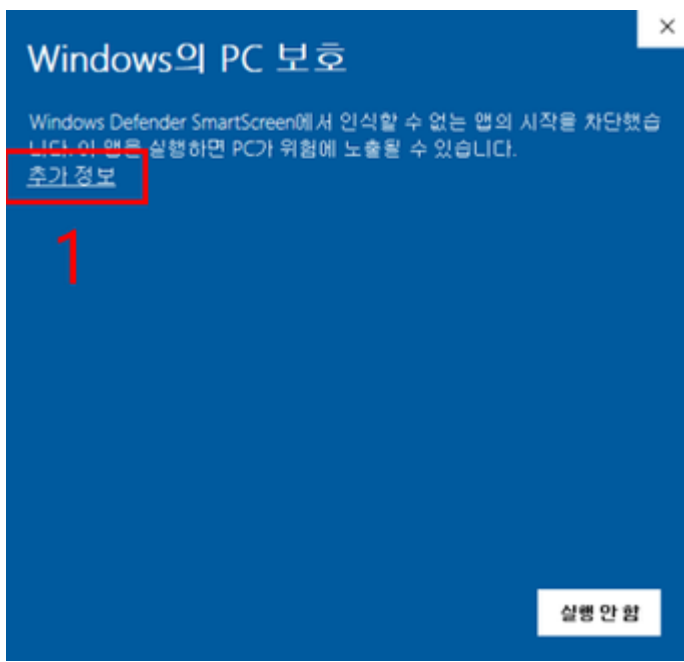


“추가정보” 클릭

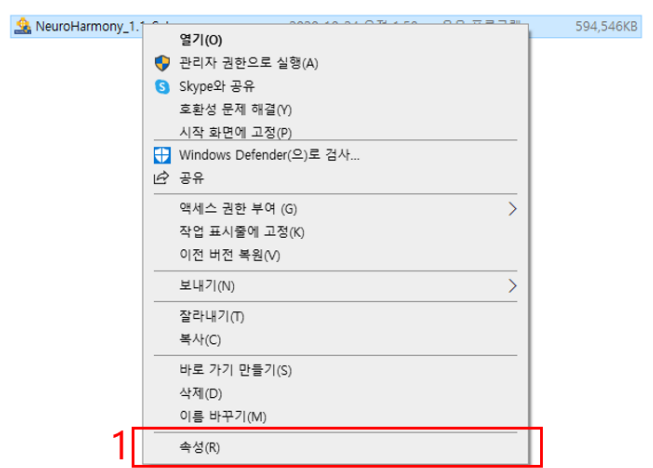

1. 설치파일 우클릭
> “속성” 클릭

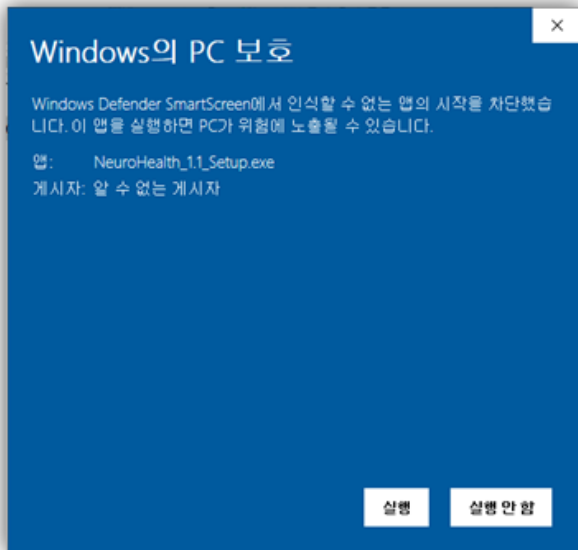


“실행” 클릭

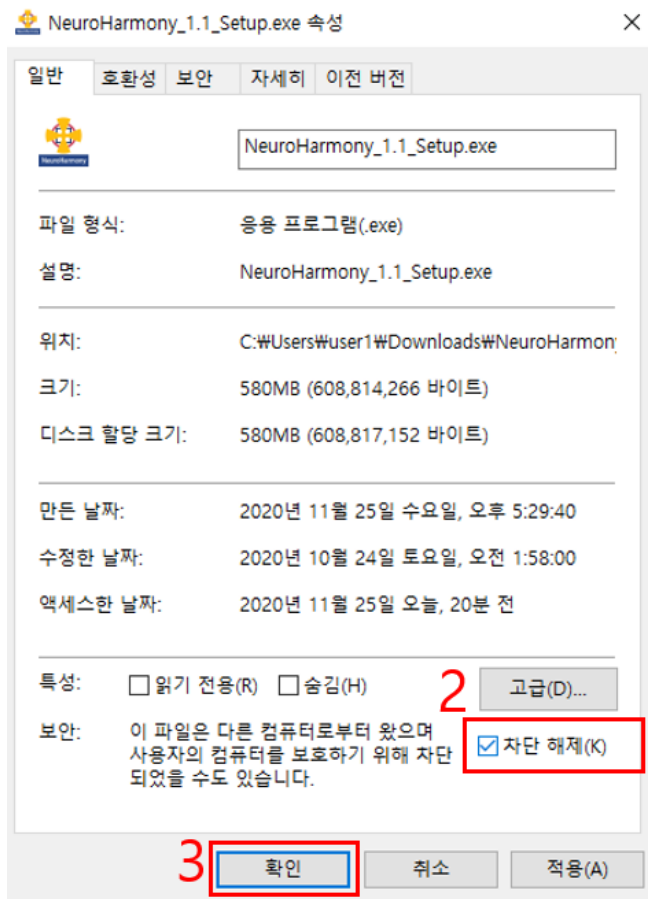


2. “차단 해제” 체크
3. “확인” 클릭


- 설치 과정은 표를 따라 진행합니다.

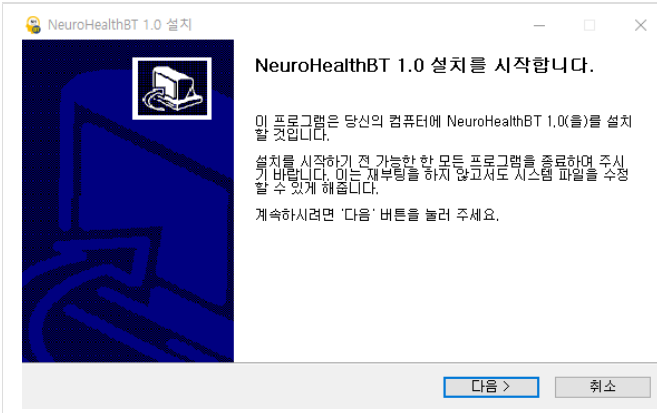


“다음” 클릭

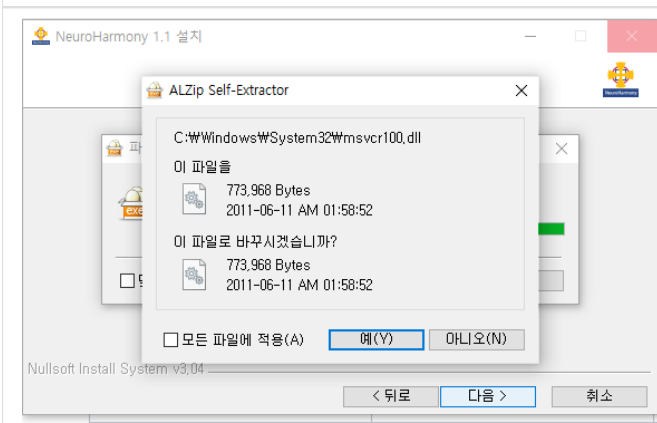

“예” 클릭

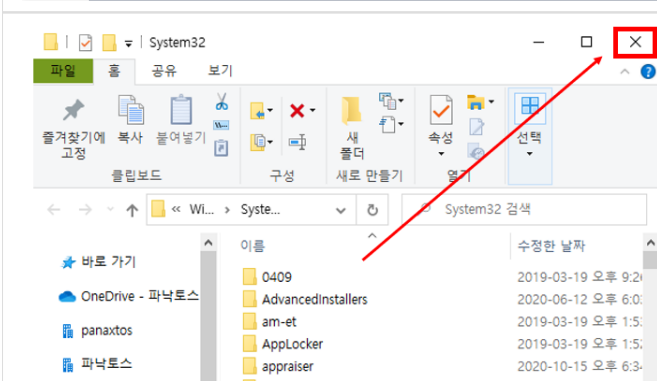


폴더가 많은 창이 나타나는데,
우측 상단의 “ X “ 클릭하여 닫기

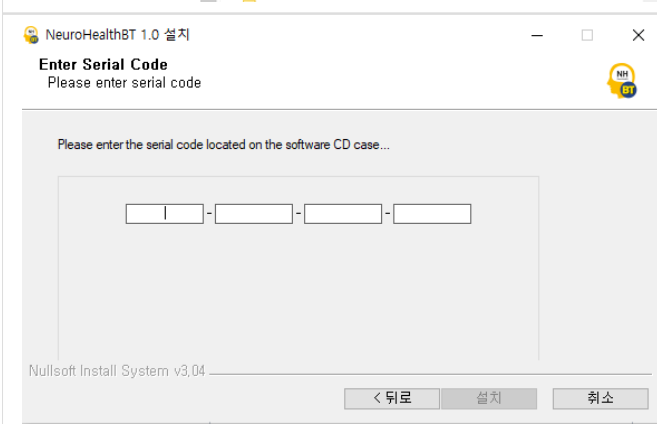

제품번호(시리얼키)를 다시 입력 한 후
”설치” 버튼을 클릭합니다.

- 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 입력시 영어, 숫자 혼동에 주의합니다.

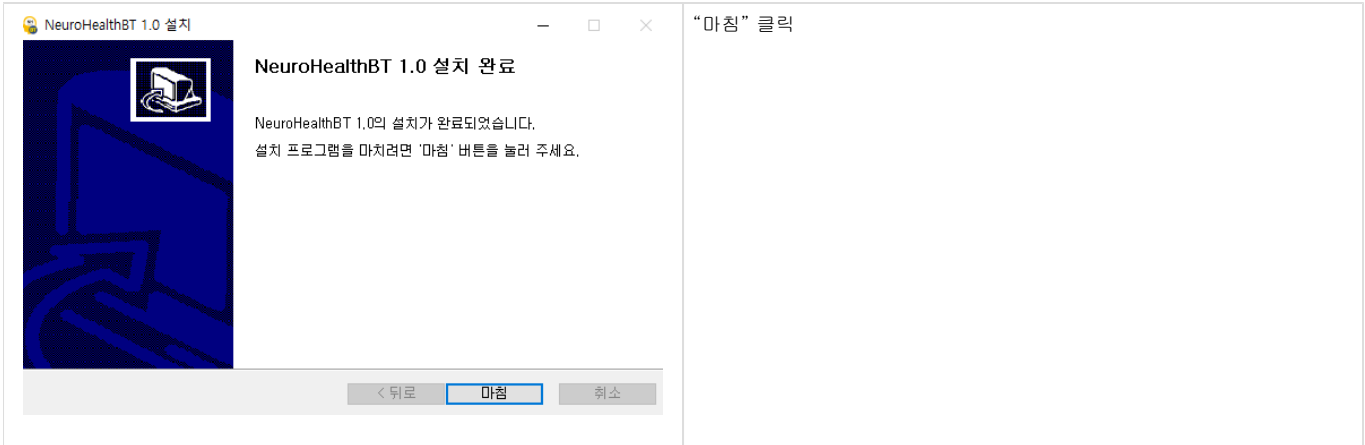


❌ 제품번호(시리얼키)입력 시 오류가 발생하는 경우



- Unkown failure!
 - 인터넷연결이 안되어 있는 경우 나타날 수 있습니다 . 인터넷을 연결해주세요.
- Wrong serial number
 - 시리얼키를 잘못입력 한 경우 나타납니다.
 - 숫자 1과 영문 l / 숫자 0과 영문O를 구분합니다.
- Exceeded the limithe install count
 - 하나의 시리얼키로 3번까지 설치가 가능하며, 설치횟수가 초과 된 경우 발생합니다.
 - 사용횟수가 모두 소진 된 상태에서 컴퓨터 고장 등으로 인하여 재설치를 하시는 경우 본사로 연락주시면 2회에 한하여 횟수조정이 가능합니다.

ℹ 블루투스 연결하기

- ✔
 - 뉴로하모니S20을 사용하기위해서 노트북(데스크탑)과 블루투스 연결을 해야합니다.
 - 데스크탑 PC에서 뉴로하모니S20을 사용하고자 하는 경우, 블루투스 동글을 별도 구매하셔야하며, 파낙토스에서는 판매하지 않습니다. (오프라인 PC매장 또는 인터넷 쇼핑 구매)
 - 블루투스의 버전이 5.0 이상인 경우 원활하게 프로그램 사용 가능합니다.
 - 5.0 미만인 경우 프로그램동작이 제대로 안될 수 있습니다.
 - 블루투스 버전확인은 각 노트북, 동글의 제조사에 문의해주세요.

- 노트북(또는 블루투스동글이 장착된 데스크탑)의 블루투스 기능을 켜주세요.

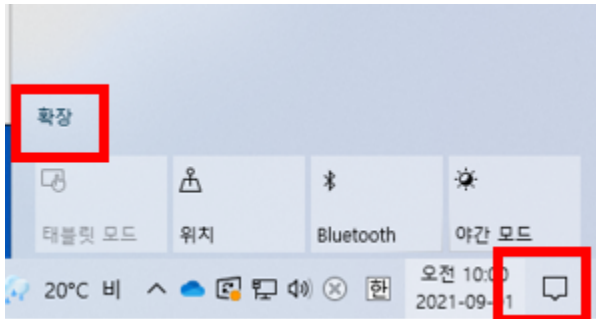

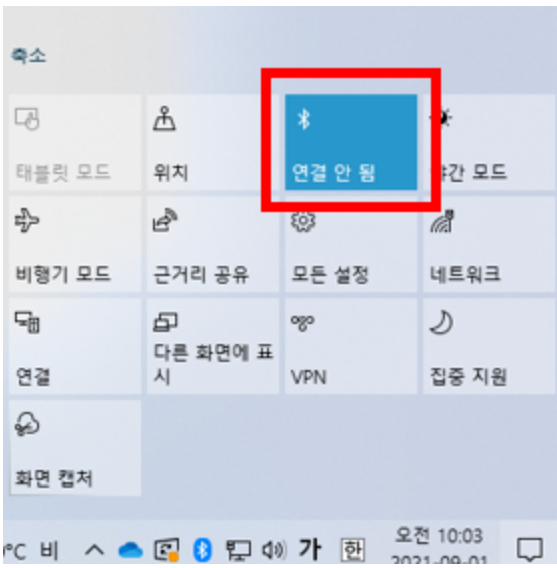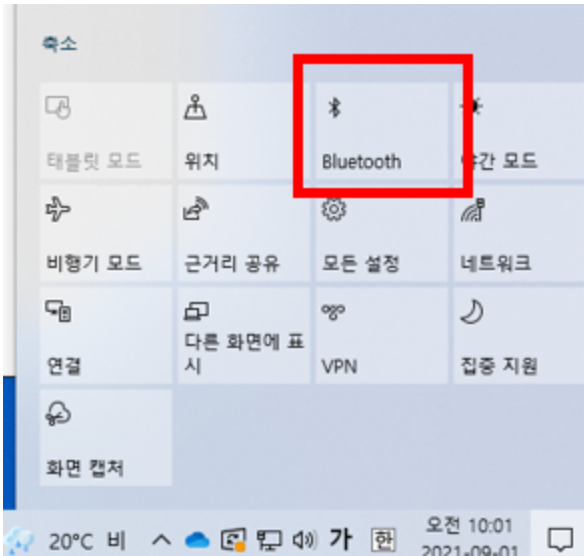

- 바탕화면의 “BTSetup” 아이콘을 더블클릭하여 실행합니다.




- 뉴로하모니S20의 전원버튼을 3~5초 눌러 전원을 켭니다.



- BTSetup 프로그램에서 블루투스 검색을 통해 연결합니다.
 - “파낙토스 장치 추가” 클릭



- 탐색결과 중 “PanaxtosS20-0000” 선택 후 추가 클릭
(뉴로하모니S20의 전원이 켜져있어야 합니다.)

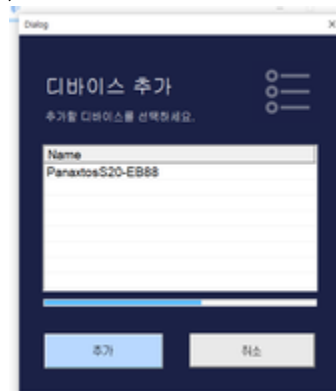

- 등록된 장치에 추가 확인 후 “연결”클릭




- 블루투스 연결이 완료되면, 뉴로하모니S20에 파란색 불이 깜박입니다.



① 훈련 진행하기

- 바탕화면의 “NeuroHealth BT” 아이콘을 더블클릭하여 실행합니다.

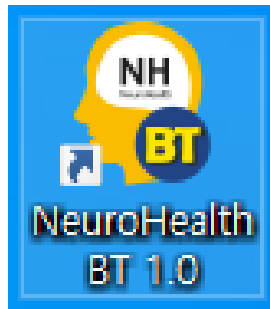

- 가장 먼저 “트레이닝 프로토콜”을 클릭하여 훈련모드를 설정합니다.
 - 자신의 훈련프로토콜을 아시는 경우 YES를 눌러 선택하고,
 - 모르는 경우 NO를 누르면 자신에게 적합한 훈련모드를 찾기위해 검사가 진행됩니다.

menu

트레이닝 프로토콜

자신의 훈련프로토콜을 아십니까?

브레인 헬스




브레인 플레이

- 뇌이전 훈련
- 집중력 훈련 1
- 집중력 훈련 2
- 공간지각 훈련
- 브레인 레이싱
- 추위력 훈련
- 기억력 훈련

브린트 이러닝

곧 업데이트 될 예정입니다.

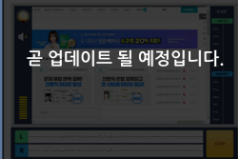


성장

Growth



호르몬 밸런스



씨즐런



뉴로스팩

곧 업데이트 될 예정입니다.

