

뉴로하모니 프로그램 설치방 법



프로그램 다운로드 및 설치하기

www.panaxtos.com 방문후 다운로드 클릭하여 페이지로 이동

뇌과학 1위 기업 파낙토스

BRAIN INNOVATION
파낙토스

언어 선택 ▼

뉴로하모니 두뇌게임 시리즈

“머리 좋아지는 게임 브레인레이싱”

브레인 레이싱은 뉴로피드백 기반 뇌훈련 게임 소프트웨어입니다.
뇌파상태에 따라 점수를 획득하여 부스터 기능을 사용할 수 있습니다.
3차원 그래픽 구현으로 게임의 몰입도를 높였습니다.

권장소비자가: 10만원 제품구매

다양한 맵을 선택하여 게임의 난이도를 조절할 수 있습니다.
훈련모드가 적용되며 게임을 통해 뇌가 훈련됩니다.
카레이싱 게임조작과 뇌파조절 능력이 승부를 결정하며 남녀노소 누구나
쉽고 즐겁게 게임을 하면서 뇌기능을 향상시킬 수 있습니다.

제품구매 자료실 **다운로드** 공지사항 질의응답 가맹문의

프로그램 다운로드 및 설치하기

홈페이지 회원 가입 후 로그인



LOGIN

BRAIN INNOVATION PANAXTOS

+ 회원로그인

회원로그인을 하시면 사이트 이용에 다양한 편리함을 이용하실 수 있습니다. 저희 사이트는 고객님의 정보에 최선을 다하여 지켜드리겠습니다.

아이디

비밀번호

아이디 기억하기

로그인



아직 회원이 아니세요? [회원가입](#)



아이디 찾기



비밀번호 찾기

프로그램 다운로드 및 설치하기

PC_NeuroHarmony 을 클릭하여 페이지 이동

다운로드

HOME > 고객센터 > 다운로드



PC_NeuroHarmony

PC용

스마트폰용

Phone_NeuroHarmony [Android]

뉴로하모니 필수프로그램
DOWNLOAD

용도에 맞는 다운로드 버튼을 선택하시면 해당 설치프로그램 상세페이지로 이동합니다.

• 설치프로그램 •

- 튼튼뇌훈련(브레인헬스)
- 씨즐런
- 뉴로스펙
- 뇌훈련모드설정
- 뇌훈련드라이버

프로그램 다운로드 및 설치하기

다운받을 프로그램 확인

- ① 구매한 제품에 한하여 선택적 다운로드
(씨리얼키 요청 프로그램)
- ② 모든 사용자 필수적 다운로드
(무제한 설치가능 프로그램)
- ③ 씨리얼 인증실패 발생시 다운로드
(무제한 설치가능 프로그램)

다운로드) [튼튼뇌훈련 \(BrainHealth2.3\)](#)

다운로드) [씨즐런 \(SizzleRun2.0\)](#)

다운로드) [브레인레이싱 \(BrainRacing1.1\)](#)

다운로드) [뉴로스펙 \(NeuroSpec2.2\)](#)

①

다운로드) [훈련모드 설정 \(TrainingProtocol2.2\)](#)

다운로드) [USB 드라이버](#)

②

다운로드) [인증패치 파일](#)

③

- ② 훈련모드설정은 브레인헬스 구동을 위한 필수 프로그램임
USB드라이버는 컴퓨터와 뉴로하모니는 연결하는 필수 프로그램임


프로그램 다운로드 및 설치하기

씨리얼키 입력하여 다운로드

제품번호 확인

씨리얼키 16자리 입력 후 다운로드

- 영문 대문자, 소문자 구별 없음.
- 1과 l, 0과 o 구별하여 입력

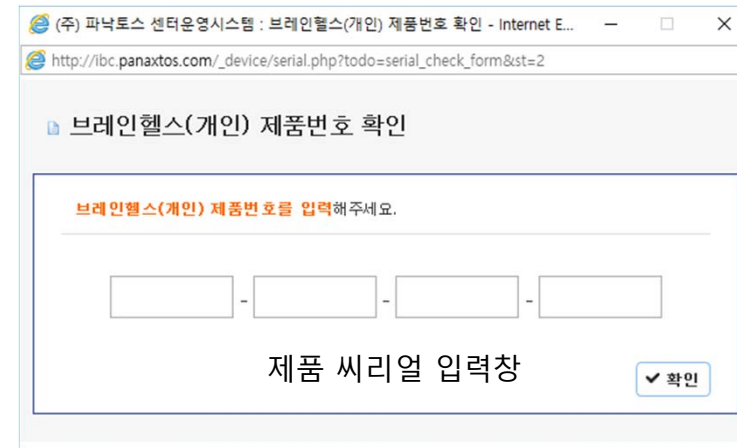


(주) 파낙토스 센터운영시스템 : 브레인헬스(개인) 제품번호 확인 - Internet E...
http://bc.panaxtos.com/_device/serial.php?todo=serial_check_form&st=2

브레인헬스(개인) 제품번호 확인

브레인헬스(개인) 제품번호를 입력해주세요.

제품 씨리얼 입력창

확인

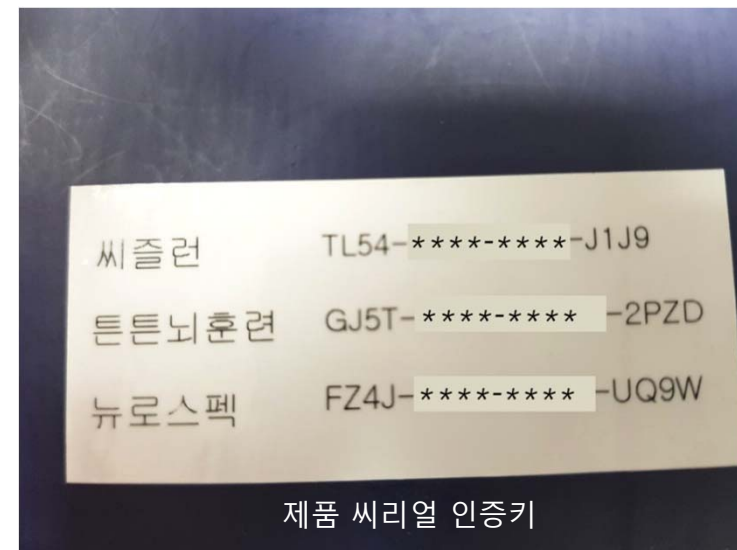

프로그램 다운로드 및 설치하기


저장 또는 다른이름으로 저장

동일한 방법으로 구매한 프로그램 모두
다운로드 진행

브레인헬스, 뉴로스펙, 브레인레이싱은
씨리얼 입력 후 다운로드

훈련모드설정, USB드라이버, 인증패치는
씨리얼 미입력 다운로드 가능

프로그램 클릭 > 씨리얼키 입력 > 저장

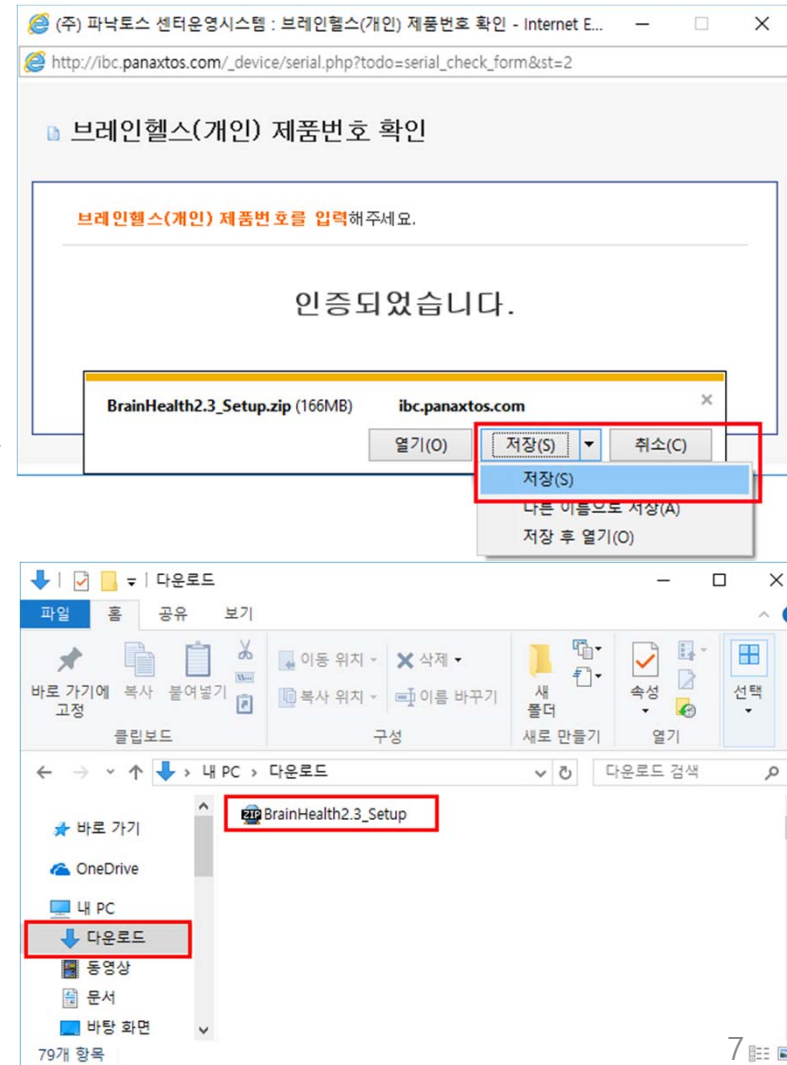


프로그램 다운로드 및 설치하기

압축풀기


다운로드한 프로그램의 압축 해제

집파일에 마우스커서를 위치시킨 뒤
마우스 오른쪽버튼을 눌러 메뉴확인


2. 압축해제 후 폴더생성 확인

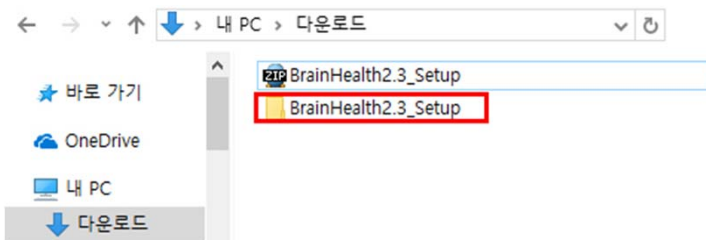

3. 폴더로 이동하여 실행파일 확인

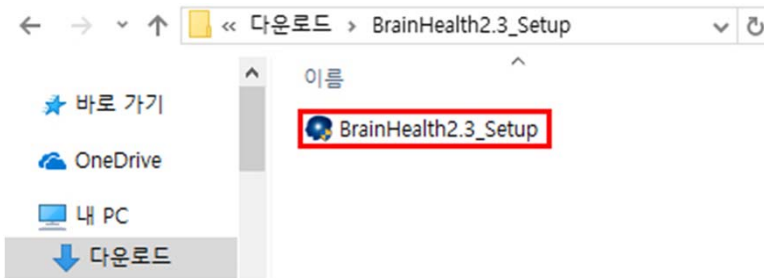

1. 압축풀기

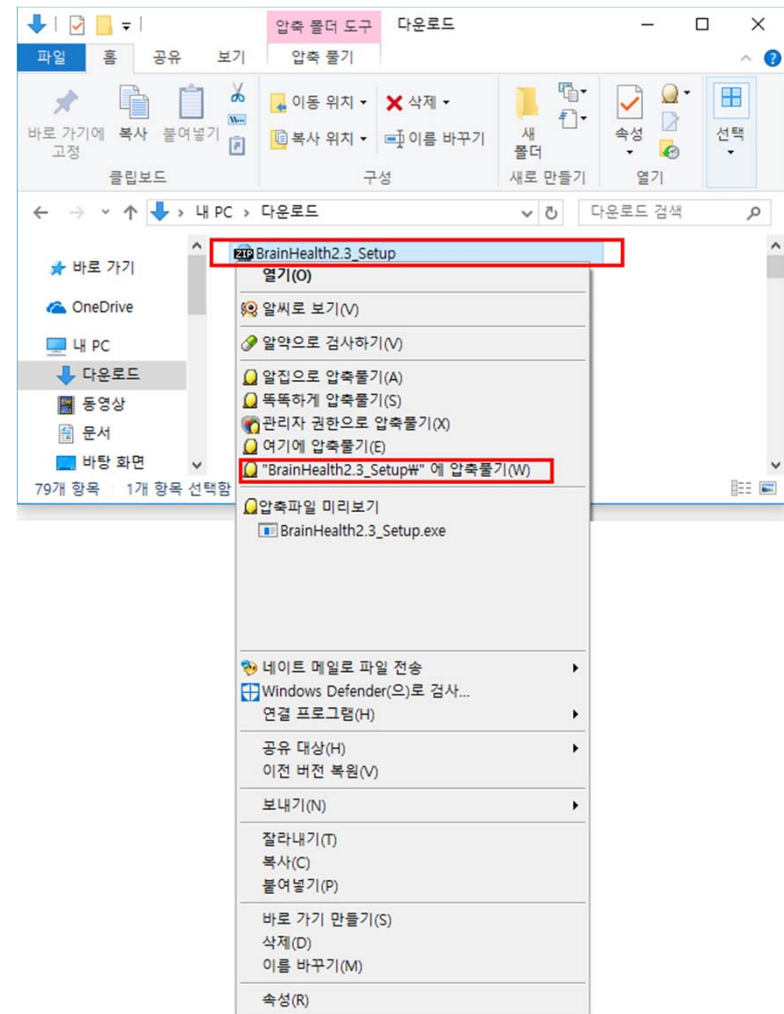


프로그램 다운로드 및 설치하기

실행하기

실행파일을 마우스로 두번 클릭하여 실행하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 메뉴를 확인한 뒤 관리자권한으로 실행

-> PC에 따라 관리자로 실행해야하는 경우가 있음

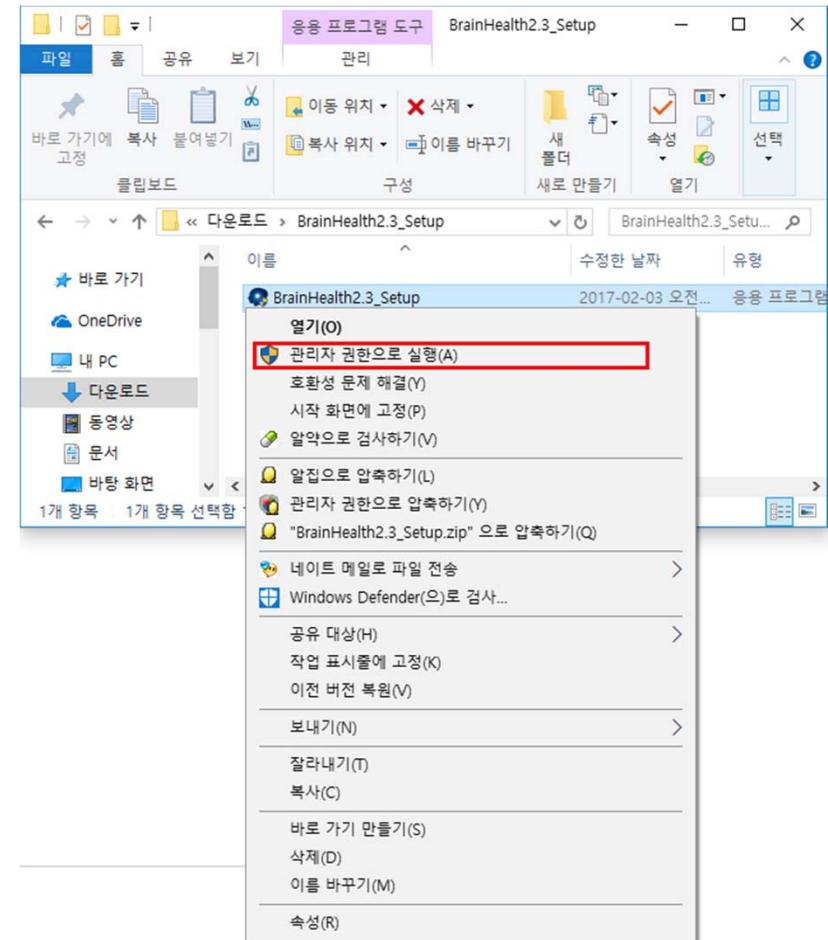


프로그램 다운로드 및 설치하기




실행하기

설치 마법사 다음 버튼을 누르면,
씨리얼키 입력창이 생성

프로그램 씨리얼키 16자리 입력

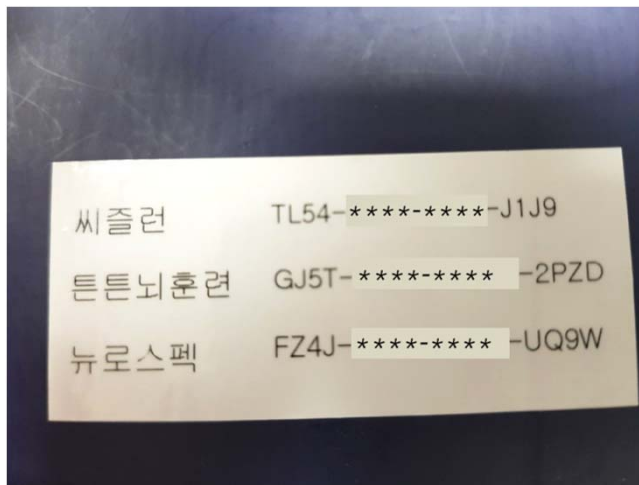

바탕화면에 아이콘 생성 완료

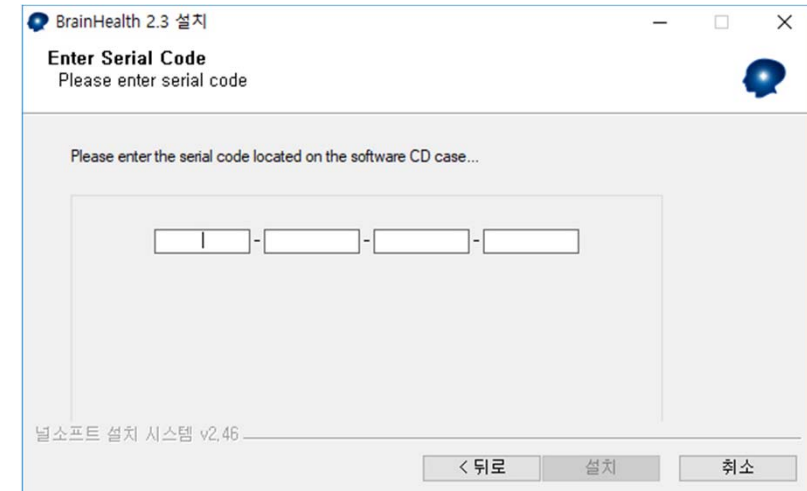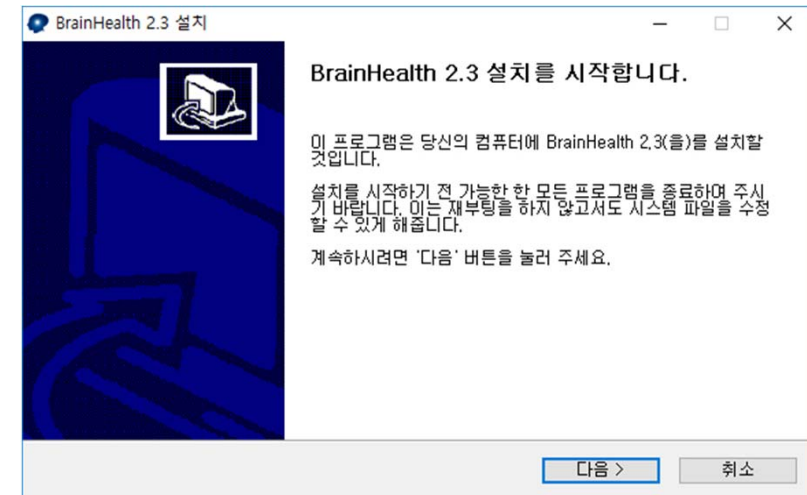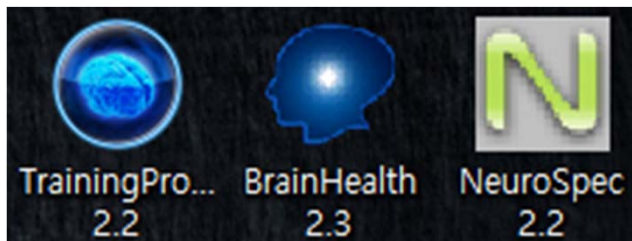

프로그램 다운로드 및 설치하기

뉴로하모니 연결하기



OTG젠더를 뉴로하모니에 연결
(집게전극이 나오는 방향으로 확인)



가운데 전극이 이마 정중앙에 오도록 위치시켜 머리를 두르듯이 밴드를 부착



집게전극이 왼쪽 귓볼에 위치하도록 착용




USB포트를 컴퓨터에 연결

프로그램 다운로드 및 설치하기

훈련모드 설정하기(트레이닝 프로토콜)

자신의 훈련프로토콜을 아십니까? 라는 화면에서
No를 선택하여 3분간 뇌파를 측정한 뒤 자신의 훈련 모드 확인

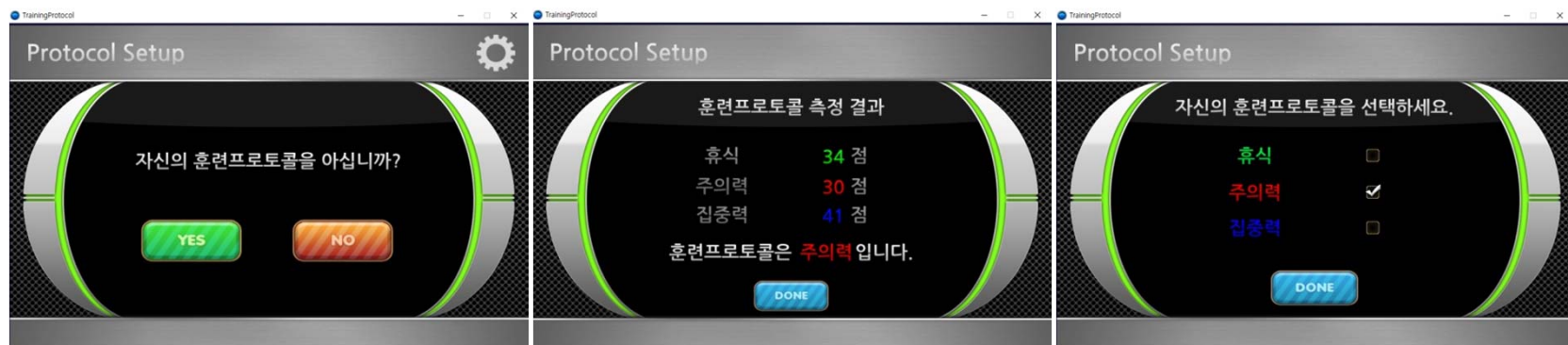

Done를 눌러 훈련모드 설정을 완료한 뒤 브레인헬스를 실행



설정키를 이용하여 싱글/멀티모드




선택 가능

멀티모드 선택시 로그인 창이 생성되며 아이디를 만들어 온 가족이 사용가능

프로그램 다운로드 및 설치하기

뇌훈련하기(브레인헬스)

트레이닝 프로토콜에서 설정한 훈련모드가 왼쪽 상단에 표시됨

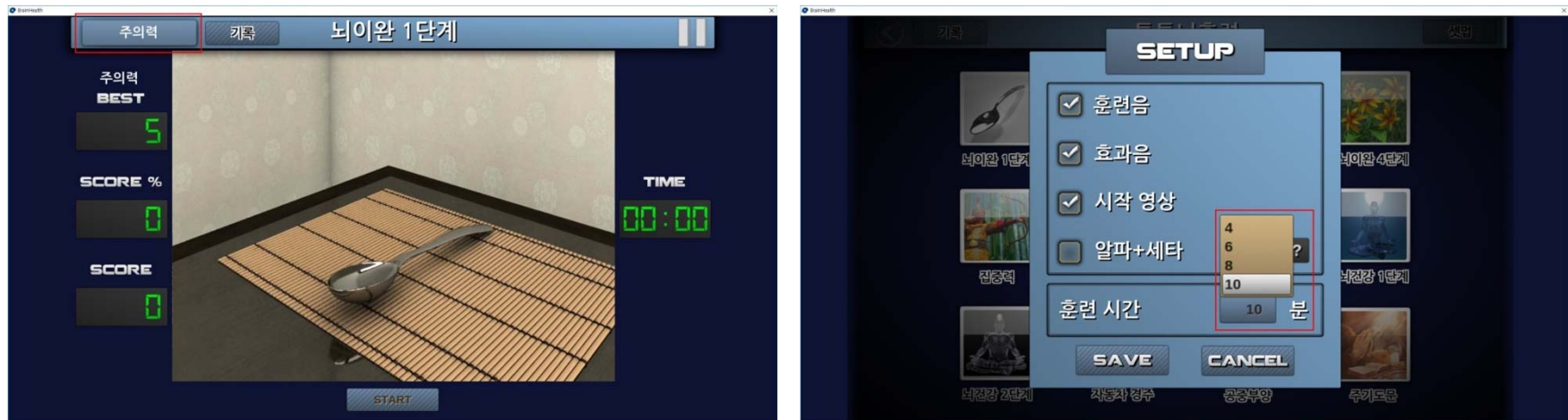

셋업

셋업버튼을 이용하여 훈련시간을 설정할 수 있음

브레인헬스 훈련방법과 훈련조합은 홈페이지 자료실에서 확인할 수 있음

www.panaxtos.com > 고객지원 > 자료실 > 브레인헬스 메뉴얼