



BQrequest 설치방법

참고사항


- 참고사항
 - BQ Tester 프로그램은 누구나 다운받아 사용할 수 있습니다.
 - BQ Tester로 측정된 결과를 보기 위해서는 BQ request를 사용해야 합니다.
 - BQ Request 프로그램은 본사와 계약한 센터, 대리점 등 계약자만 다운받아 사용할 수 있습니다.
 - BQ Request의 제품번호(시리얼키)는 가맹 시 입력하신 이메일주소로 전달됩니다.
 - 설치파일을 다운받는 방법엔 3가지가 있으나, 본 문서에서는 한가지만 작성합니다.
 - 파낙토스 본사 홈페이지에서 다운로드**
 - 바이온스 홈페이지에서 다운로드
 - BQ 가맹사 전달받은 이메일을 통해 다운로드

파낙토스 홈페이지 접속

- 인터넷 브라우저를 실행합니다.
 - 네이버 웨일과 크롬 브라우저는 브라우저 보안설정에 따라 다운로드가 진행되지 않을 수 있습니다. 인터넷 익스플로어 또는 마이크로소프트 엣지 브라우저 사용을 권장합니다.
 - 본 가이드에서는 **마이크로소프트 엣지(Microsoft Edge)**를 사용하였습니다.

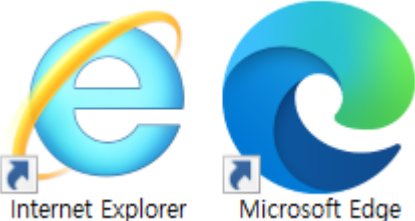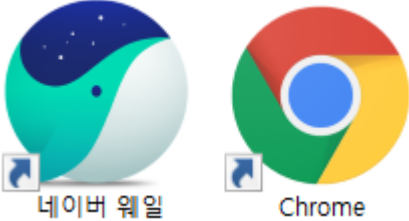사용 추천	보안을 사유로 비추천
 Internet Explorer Microsoft Edge	 네이버 웨일 Chrome

- 검색창에 “파낙토스” 를 입력하여 검색합니다.

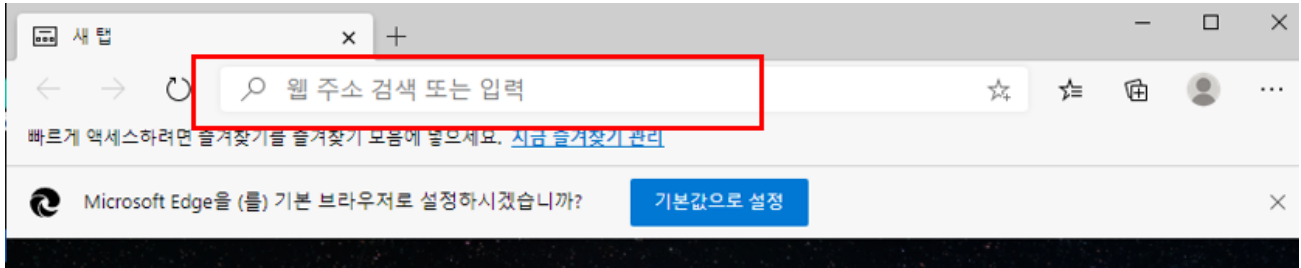

- 검색결과 중 “**뇌과학1위기업 파낙토스**”를 클릭합니다.

집중력은 파낙토스 뉴로하모니



<http://www.panaxtos.com> ▼

(광고) 뇌훈련센터, 기억력, 홈스쿨링, ADHD, BQ검사, 뉴로피드백훈련, 집중력 센터안내 · 가명안내 · 다운로드 · 제품소개

뉴로피드백 마인드브레인

<http://www.mindbrain.co.kr> ▼

(광고) 홈페이지모집, 뉴로하모니, 1:1 예약제 훈련, 집중력, 불면개선, 정서안정 센터안내 · 홈페이지 모집 · 제품구매 · 상담문의

이음두뇌연구소파낙토스

<https://ieumlab.modoo.at> ▼

(광고) 두뇌훈련과 심리미술활동을 통한 학습능률 파낙토스항상 프로그램 지난달에 사용자 10,000명 이상이 modoo.at에 방문했습니다.

파낙토스 다나와

<http://www.danawa.com> ▼

(광고) 파낙토스, 살 땀 사더라도 최저가로 알뜰쇼핑 하셔야죠! 가격비교 다나와! 지난달에 사용자 10,000명 이상이 danawa.com에 방문했습니다.


뇌과학 1위 기업 파낙토스

<https://www.panaxtos.com> ▼


파낙토스 병원특판 본부장 송은숙 입니다. 안녕하십니까. 파낙토스 병원특판 본부장 송은숙 입니다. 전세계 뇌과학 1위 기업 파낙토스의 뉴로피드백 뇌파훈.. [병원특판 1지사] 송은숙 / 2020.11.13

1 설치프로그램 다운로드

- 화면 우측상단의 “로그인”을 클릭하여 로그인 합니다.
 - 아이디가 없는경우엔 “회원가입”을 먼저 진행 하신 후 로그인을 합니다.

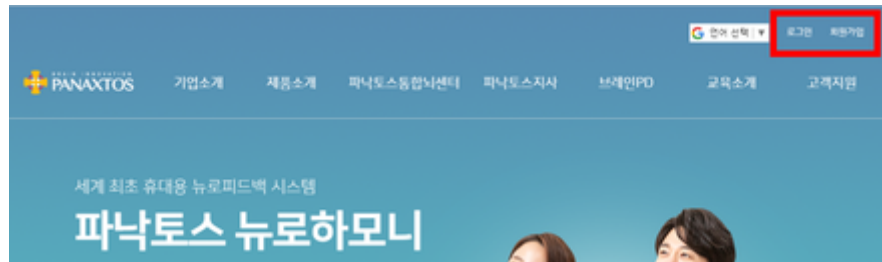

- 로그인 진행 후, 좌측 하단의 “프로그램 다운로드”를 클릭합니다.

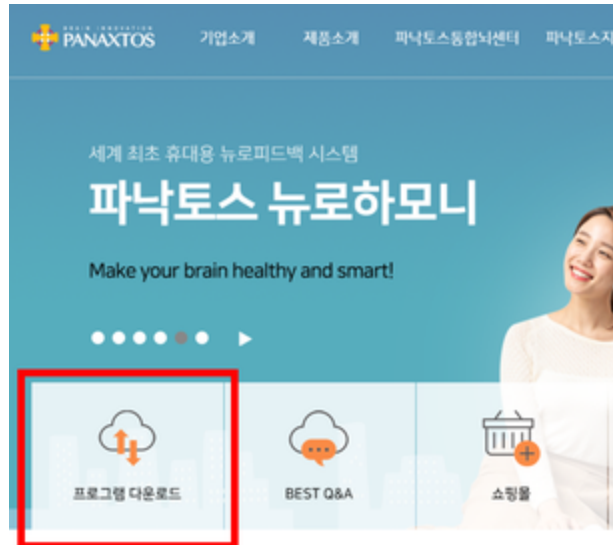

- 자료실로 이동되면, 좌측하단의 “BQ테스트(뇌 기능 분석 프로그램)” 를 클릭합니다.

[필수 프로그램 다운로드](#) | [자료실](#)



i BQtester (비큐테스터) 다운로드 및 설치

- “BQtester1.3.1e” 를 클릭합니다.

BQ 테스트(뇌기능분석) 프로그램입니다.

이 프로그램은 윈도우 비스타 이상에서 실행이 가능합니다.

뉴로하모니스 및 뉴로하모니M 모델에서 사용 가능합니다.

그리고 아래 BQ Request 프로그램은 BQtester로 검사한 bfn 파일을 당사 서버로 보내 분석된 ban 파일을 내려 받을 수 있는 프로그램입니다.


이 프로그램은 본사와 계약한 센터, 대리점 등 계약자만 다운받아 사용할 수 있습니다.

다운로드) [BQtester1.3.1e 윈도우즈 VISTA / 7 / 8 / 10 용](#)

다운로드) [BQ Request 다운로드](#)

❌ 브라우저의 설정에 따라 팝업이 차단되는 경우가 있습니다.
아래와 같은 방법으로 팝업 차단을 해제해주세요.

1. “확인” 클릭
2. “항상 <http://cert.panaxtos.com>의 팝업 및 리디렉션 허용” 체크
3. “완료” 클릭
4. 좌측상단의 닫기 (X)를 눌러 다운로드 페이지로 이동하여 다시 BQ request다운로드 클릭

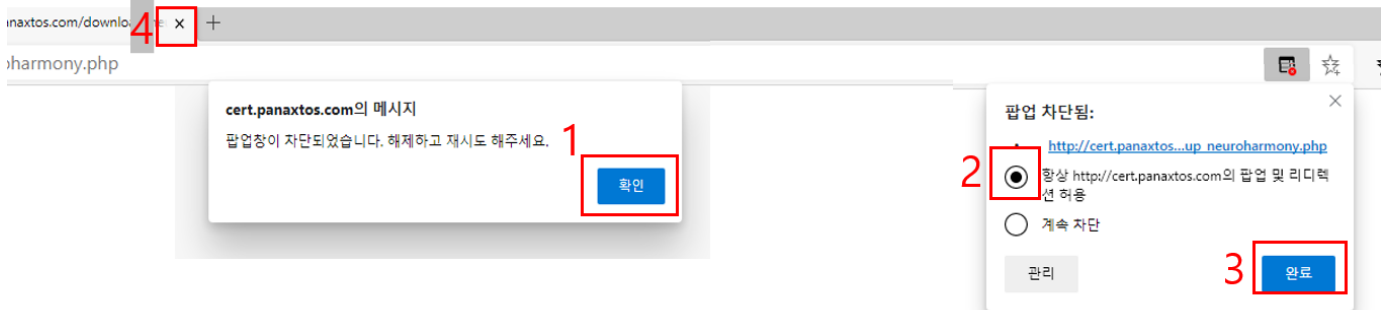


- 제품번호 확인 창이 나타나면, 하단의 칸에 제품번호(시리얼키)를 입력합니다.
 - 제품번호(시리얼키)는 가맹시 입력하신 이메일주소로 발송됩니다.
 - 이 화면에서 입력하시는 제품번호(시리얼키)는 사용횟수가 차감되지 않습니다.
 - 대소문자를 구분하지 않습니다.
 - 입력시 영어, 숫자 혼동에 주의합니다.


숫자	알파벳
0	O
1	I



- 제품번호를 알맞게 입력하신 후 “확인” 버튼을 클릭하면, 다운로드가 진행됩니다.
다운로드가 완료되면 “모두 표시” 버튼을 클릭합니다.

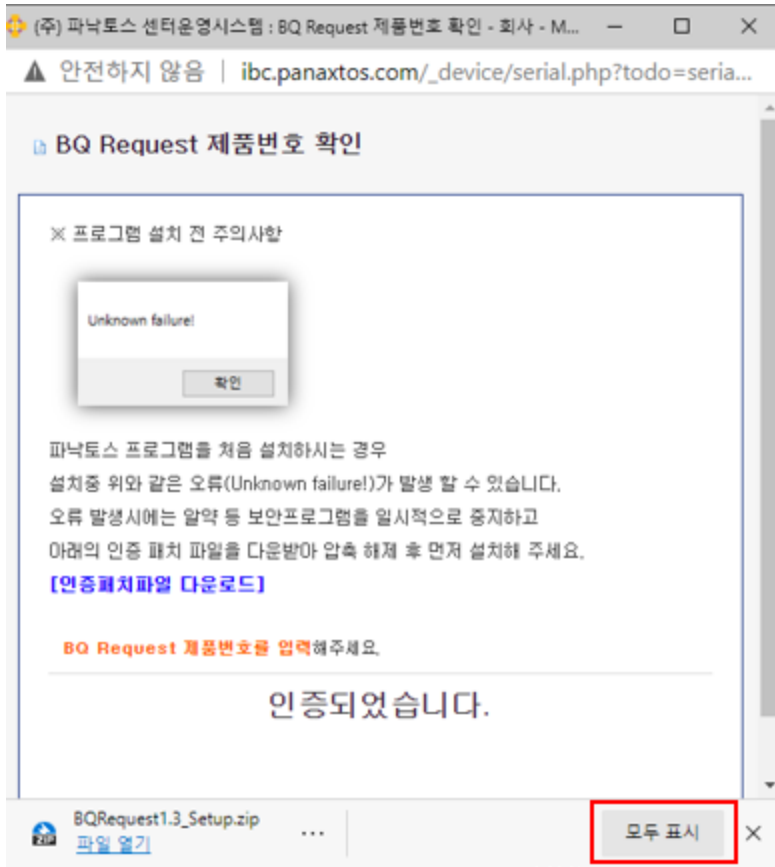

- BQrequest1.3_Setup 의 “**폴더에 표시**” 를 클릭하면 다운로드 받은 폴더가 나타납니다.

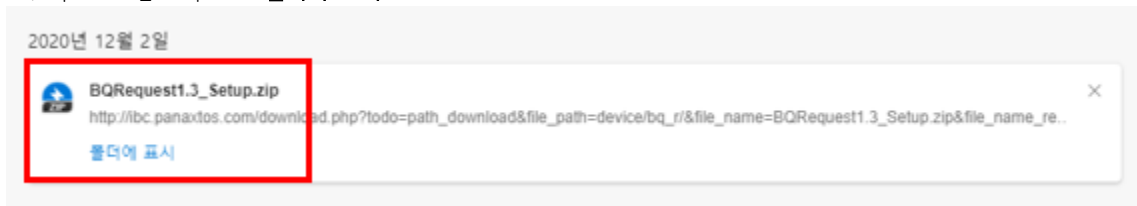

- 다운로드 폴더가 열리면 Bqrequest 설치프로그램이 다운로드 된 것을 확인 할 수 있습니다.

이름	수정한 날짜	유형	크기
BQRequest1.3_Setup.zip	2020-12-02 오전 10:29	압축(ZIP) 파일	37,247KB

- “BQrequest1.3_Setup” 을 마우스 오른쪽 클릭하면 메뉴가 열립니다.
 - 아래와 같은 방법을 통해 압축을 해제합니다.
 - 검색어 글씨(BQrequest1.3_Setup)부분을 마우스 오른쪽 클릭해야 메뉴가 열립니다.

이름	수정한 날짜	유형	크기
BQtester1.3.1e for Windows2kXpVtW7.KR.zip	2020-11-30 오후 5:28	압축(ZIP) 파일	26,354KB

사용하시는 컴퓨터에 따라 보이는 화면이 다릅니다.

자신의 컴퓨터에 나타나는 “압축풀기” 를 진행해주세요.

“압축 풀기” 클릭	“알집으로 압축풀기”클릭	“반디집으로 압축풀기”클릭												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>이름</th> <th>수정된 날짜</th> <th>유형</th> <th>크기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BQRequest1.3_Setup.zip</td> <td>2020-12-02 오전 10:29</td> <td>압축(ZIP) 파일</td> <td>37,247KB</td> </tr> <tr> <td>BQRequest1.3_Setup</td> <td>2020-12-02 오전 10:34</td> <td>파일 폴더</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			이름	수정된 날짜	유형	크기	BQRequest1.3_Setup.zip	2020-12-02 오전 10:29	압축(ZIP) 파일	37,247KB	BQRequest1.3_Setup	2020-12-02 오전 10:34	파일 폴더	
이름	수정된 날짜	유형	크기											
BQRequest1.3_Setup.zip	2020-12-02 오전 10:29	압축(ZIP) 파일	37,247KB											
BQRequest1.3_Setup	2020-12-02 오전 10:34	파일 폴더												
(위) 압축해제 전 / (아래) 압축해제 완료)														

- ❌ 알집으로 압축풀기를 하시는 경우, 안전폴더에 풀기 버튼이 나타납니다.
 - 진행하게되면 정상적인 설치가 안되기때문에, 반드시 “예” 를 눌러주세요.
 - 컴퓨터에 따라 나타나지 않을 수 있습니다.

의심 파일 경고



의심되는 파일이 포함되어 있습니다. 압축해제를 진행하시겠습니까?

이 파일은 안전폴더에 압축해제 후 바이러스 검사를 권장합니다.

압축파일에 이중확장자가 포함되어 있습니다. (신고하기)

C:\#Users\#user1\#Down...#\NeuroHarmony_1.1_Setup.zip

안전폴더에 풀기

예


아니오

- 압축해제 된 BQRequest1.3_Setup폴더에 진입 하신 후 “ BQRequest1.3_Setup” 를 실행합니다.


이름	수정된 날짜	유형	크기
BQRequest1.3_Setup.exe	2017-11-29 오후 5:50	응용 프로그램	13,427KB
BQtester1.3.1e for Windows.KR.exe	2012-04-23 오후 7:46	응용 프로그램	25,238KB

- 설치 과정은 표를 따라 진행합니다.



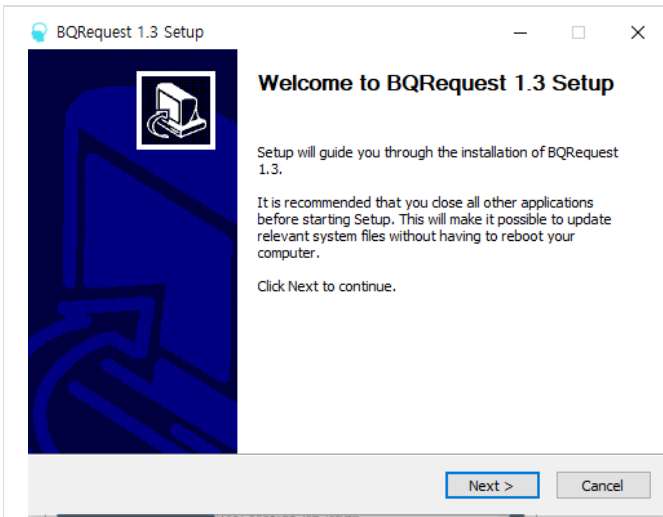


“Next” 클릭

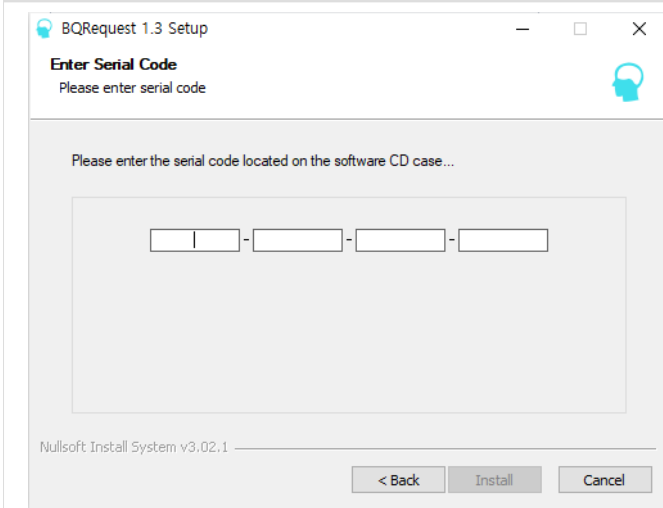

제품번호(시리얼키)를 다시 입력 한 후
”설치” 버튼을 클릭합니다.

- 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 입력시 영어, 숫자 혼동에 주의합니다.

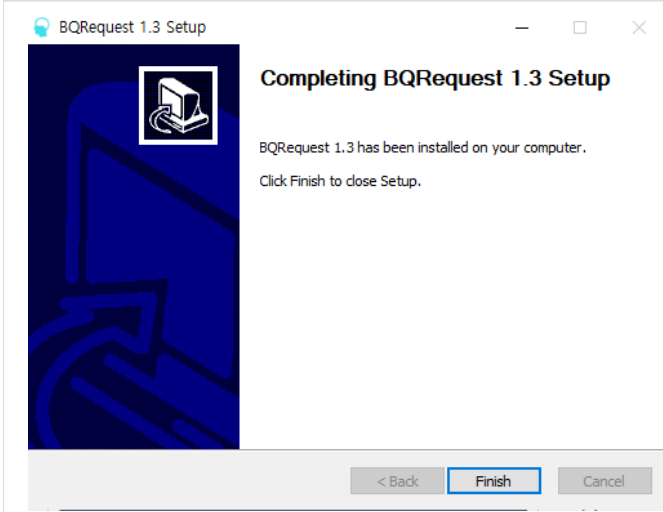

“Finish” 클릭

- 설치를 완료하면 바탕화면에서 확인 할 수 있습니다.
- BQrequest

